

機械器具 80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 家庭用貼付型接触粒 JMDNコード 71026000

パッチタン


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

＜各部の名称＞

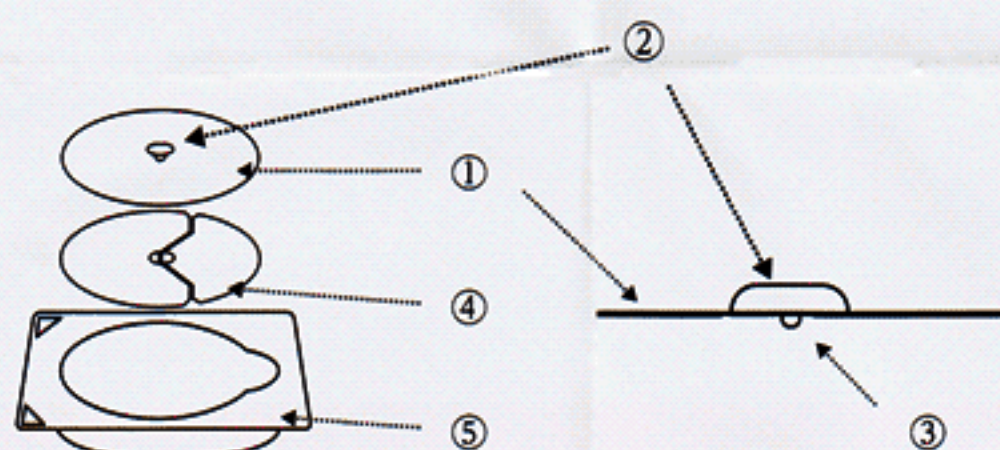

	構造名称
①	テープ(アクリル系粘着剤使用)
②	固定部
③	接触部(チタン合金)
④	台紙
⑤	包装容器(カートリッジ)

【使用目的又は効果】

粘着テープの中央にある粒状の接触部を、
コリの部分に貼付することにより圧迫し「コリの緩解」を目的とする。

【使用方法等】

- 貼る前に、皮膚の脂や汗をよく拭いてください。
- コリ、痛みのある部分を指等で押し、よく感じる箇所に貼ってください。


- ① シール紙を開けて
イラスト図の様に
取り出します



- ② 貼付したい場所に
イラスト図の様に
貼ります



- ③ 残った片側の台紙を
剥がし貼り付けます

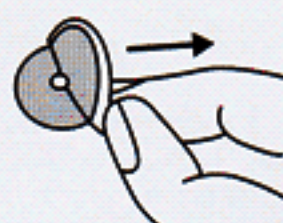

- ④ 最後に軽くテープを
押えます



【使用上の注意】

＜使用注意(次の患者には慎重に適用すること)＞

- 妊婦[陣痛を誘発するおそれがある]
- 悪性腫瘍を有する患者[悪性腫瘍の成長、転移を促進させるおそれがある]
- 出血性疾患の患者[出血を助長するおそれがある]
- 接触性皮膚炎、アレルギーのある患者。

＜重要な基本的事項＞

- ご使用にあたっては、本品に異常がないか確認してからご使用してください。
- 使用中、接触部分が皮膚を傷付ける事があります。その際は、剥がした後の傷跡を化膿防止の為に消毒し、掻かないようにしてください。
- 固定部は凸部となっていますので、衣類等に引っかからないようにご注意ください。
- 固定部へ過度な衝撃を加えますと破損するおそれがありますのでご注意ください。
(例：貼付した部位が床、壁等に当たる・擦れる等。)
- 固定部に過度な力を掛けて引っ張ると固定部が取れてしまう可能性がありますのでご注意ください。
- 本品の使用によって皮膚に発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
- 場合によっては使用中、痛みや疲労感が増す事があります。刺激が強すぎる可能性もありますので、念の為本品を全て剥がしてください。従前の状態に戻った時は、貼り付ける本数を少なくし、ご使用ください。
- ご使用後、皮膚に貼り付け跡が残る事がありますが、通常は数日で消えます。
- 本品を廃棄する場合には、お住まいの市区町村の廃棄方法に従って廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 水ぬれ、直射日光、高温多湿及び化学物質で汚染される可能性のある場所を避けて保管してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

＜有効期間＞

- 外箱に記載(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： セイリン株式会社

住 所： 〒424-0037
静岡県静岡市清水区袖師町 1007-1

お問合せ番号： 054-365-5380

受付時間 9時から17時(土・日・祝日を除く)

肩・腰・足など体全体のコった部分に貼るだけ

■安全設計

個別包装され開封まで無菌維持された商品です。
1枚のテープに接触部を樹脂で固定しているの
で、接触部が取れる心配はほとんどありません。

■皮膚にやさしい

テープは通気性の良い医療用不織布テープを使用。
ムしったり、かぶれたりすることが少なく、しかも剥がれ
にくいので、皮膚にぴったり密着します。

■衛生的

指がテープの粘着面に触れることがないよう、独自の
工夫を施しましたので、衛生的にご使用いただけます。

■品質管理

国内一貫生産のもと、ISO13485:2003 を認証取得し、
徹底した品質管理体制を確立しております。

使用上の注意

- 肌に傷、湿疹などのある所には使用しないでください。
- 目の周囲及び粘膜部分には使用しないでください。
- 本品を貼り直すとテープが剥がれやすくなります。貼り直しはしないでください。
- 入浴時は本品を外し、入浴後改めて新しい本品を貼ってください。
- 貼付した場所が発赤したり、カユミを感じるなど通常と異なる反応を示したり感じた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 伸縮性に優れたテープではありません。テープが剥がれやすくなる可能性がありますので貼る部分の筋肉、皮膚を伸ばした状態で貼るようにしてください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。

警 告

- ご使用に際しては、添付文書をよくお読みください。


使用 方 法

1



無菌維持された個別包装のケースを1つ
取りはずします。

2

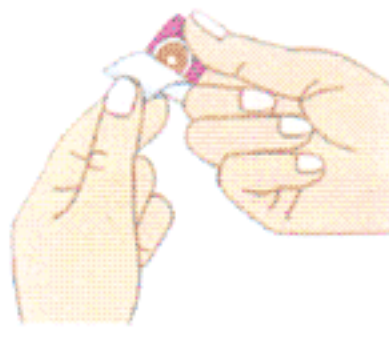


シール紙をはがします。

3



カートリッジを山折にします。

4

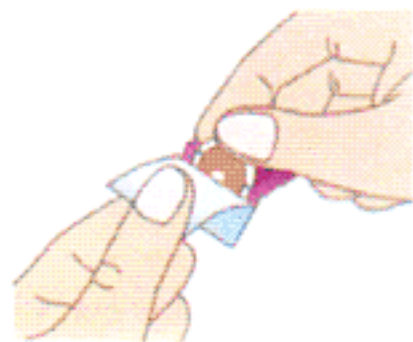


テープと共に剥離紙(扇形のシート)を
指ではさみ、つまみあげてください。

5



剥離紙のついた状態で皮膚に貼付してく
ださい。


6

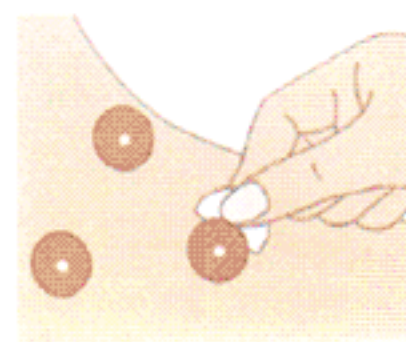

貼付後、残っている剥離紙を外し、上から
軽く押さえて確実に貼付してください。

コリの緩解のポイント

コリ・痛みなどをを感じる部位を指で押して、痛みなどをを感じる部位に貼付すると効果的です。

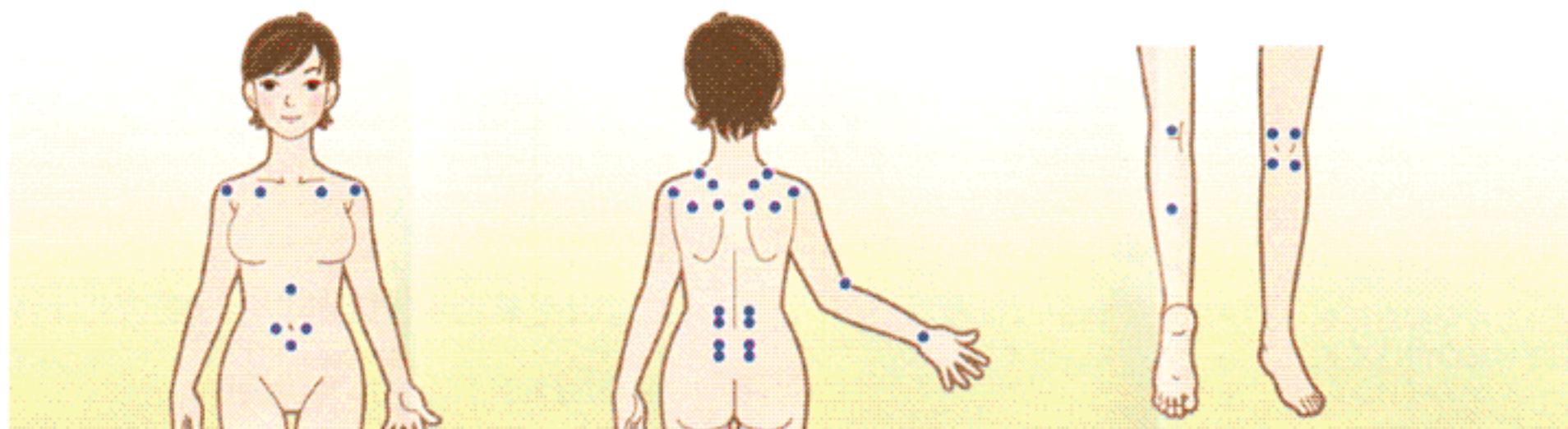

一般医療機器

医療機器届出番号：22B1X00006000008
一般的名称：家庭用貼付型接触粒
販売名：パッチタン
使用目的：コリを緩解する
人数：20本入
接触部材料：チタン合金

製造販売業者：

セイリン株式会社
静岡県静岡市清水区袖師町 1007-1

お問い合わせ先：

054-365-5380

受付時間 9時から17時まで(土・日・祝日を除く)