

この製品は、取扱い説明書を必ず読んでからご使用ください。

コンドームの適正な使用は、避妊に効果があり、エイズを含む他の多くの性感染症に感染する危険を減少しますが、100%の効果を保証するものではありません。

★使用上の注意

- 1) コンドームの使用は、1個につき1回限りです。
その都度、新しいコンドームをご使用ください。
- 2) コンドームには爪や歯、その他硬いものに強く触れないようにしてください。その時のキズが使用中破れの原因となります。
- 3) この製品は天然ゴムラテックスを素材にしています。
天然ゴムラテックスは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。
このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 4) このコンドームは男性のペニスに装着し、女性の膈内に挿入する性行為に適用するよう設計されています。これ以外の使用は破れる危険があります。
- 5) エイズ(AIDS)を含む性感染症は、接触感染ですのでコンドームは必ず性器接触の前に装着してください。避妊を目的とする場合でも、はじめから装着してください。精子は射精時のみならず、射精前後でも流出します。引き続き性行為を行う時は、特にご注意ください。
- 6) 膈内に挿入する坐剤、外部性器に塗布する軟膏などの医薬品やベビーオイル、マーガリン、ローション、ハンドクリームなどと接触すると、コンドームが劣化し、破れる危険があります。コンドームの使用時には、これらと接触しないよう注意してください。
- 7) 使用期限を過ぎたコンドームは破れる危険がありますので使用しないでください。

★保管上の注意

- 1) 下記の場所に保管しないでください。
 - a) 直射日光のあたる場所
 - b) 高温多湿の場所
 - c) 防虫剤などの揮発性物質のある場所
- 2) 購入時の包装に入れたまま保管し、その都度、取り出してください。個別包装のまま携帯しないでください。

★装着方法

- 1) コンドームは性器接触前にペニスが勃起状態になってから、ペニスに装着してください。
- 2) 使用直前にコンドームを個別包装内の端によせ、コンドームから遠い端を指で破り、コンドームにキズを付けないよう取り出してください。(図1)
- 3) コンドームには表裏があります。表裏をよく見てから亀頭の上に置きます。(図2)

この際、空気を抱きこまないように、コンドームの先端の精液溜り部分を軽く押さえてください。(図3)
精液溜りのないコンドームの場合は、亀頭先端にピッタリと密着させてください。

- 4) コンドームを、ゆっくりと両手の指でペニスの根元に向かってころがしながら、根元までかぶせてください。(図4)

この際、表裏を間違えると装着ができません。

- 5) 射精後は、すみやかにコンドームを押さえながら、ゆっくりと膣外へ抜き出してください。
- 6) 使用したコンドームは水洗トイレに流さず、各自治体の処分方法に従ってください。

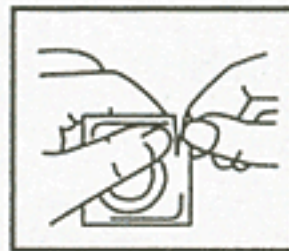


図1

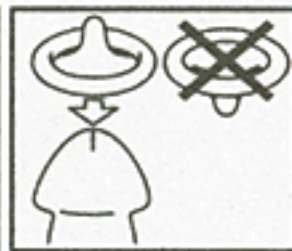


図2



図3



図4

製造販売元



オカモト株式会社

東京都文京区本郷3丁目27番12号
03-3817-4226 (お客様相談室)

製造元

オカモトラバープロダクツ(タイ)

<http://www.okamoto-condoms.com>