

この製品は、取扱い説明書を
必ず読んでからご使用ください。


コンドームの適正な使用は、避妊に効果があり、エイズを含む他の多くの性感染症に感染する危険を減少しますが、100%の効果を保証するものではありません。

★使用上の注意

- 1) コンドームの使用は、1個につき1回限りです。その都度、新しいコンドームをご使用ください。
- 2) コンドームには爪や歯、その他硬いものに強く触れないようにしてください。その時のキズが使用中破れの原因となります。
- 3) コンドームを使用する人によって、まれにアレルギー症状を起こすことがあります。アレルギー症状が起きた時には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 4) このコンドームは男性のペニスに装着し、女性の膣内に挿入する性行為に適用するよう設計されています。これ以外の使用は破れる危険があります。
- 5) エイズ(AIDS)を含む性感染症は、接触感染ですのでコンドームは必ず性器接触の前に装着してください。避妊を目的とする場合でも、はじめから装着してください。精子は射精時のみならず、射精前後でも流出します。

引き続き性行為を行う時は、特にご注意ください。

- 6) 膣内に挿入する坐剤、外部性器に塗布する軟膏などの医薬品やベビーオイル、マーガリン、ローション、ハンドクリームなどと接触すると、コンドームが劣化し、破れる危険があります。コンドームの使用時には、これらと接触しないよう注意してください。
- 7) 使用期限を過ぎたコンドームは破れる危険がありますので使用しないでください。

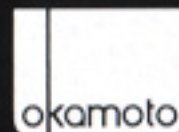

オカモト株式会社

E-mail info@tmx.okamoto-inc.co.jp

製造販売元

東京都文京区本郷3丁目27番12号 〒113-0033

お客様相談室 TEL 03-3817-4226

受付時間 9時～17時 土日祝日年末年始を除く

★保管上の注意

- 1) 下記の場所に保管しないでください。
 - a) 直射日光のあたる場所
 - b) 高温多湿の場所
 - c) 防虫剤などの揮発性物質のある場所
- 2) 購入時の包装に入れたまま保管し、その都度、取り出してください。個別包装のまま携帯しないでください。

★装着方法

- 1) コンドームは性器接触前にペニスが勃起状態になってからペニスに装着してください。
- 2) 使用直前にコンドームを個別包装内の端によせ、コンドームから遠い端を指で破り、コンドームにキズを付けないよう取り出してください。(図1)
- 3) コンドームには表裏があります。表裏をよく見てから亀頭の上に置きます。(図2) この際、空気を抱きこまないように、コンドームの先端の精液溜り部分を軽く押さえてください。(図3) 精液溜りのないコンドームの場合は、龟头先端にピッタリと密着させてください。

- 4) コンドームを、ゆっくりと両手の指でペニスの根元に向かってころがしながら(図4) 根元までかぶせてください。(図5) この際、表裏を間違えると装着ができません。
- 5) 射精後は、すみやかにコンドームを押さえながら、ゆっくりと膣外へ抜き出してください。
- 6) 使用したコンドームは水洗トイレに流さず、各自治体の処分方法に従ってください。

