

使用方法に関する注意


①爪や歯、開封時の切れ端、その他硬いものに強く触れないようにしてください。その時のキズが使用中の破損の原因となります。②コンドームは性器接触前にペニスが勃起状態になってから、装着してください。③性感染症は、接触感染ですのでコンドームは必ず性器接触の前に装着してください。④避妊を目的とする場合でも、はじめから装着してください。精子は射精時だけでなく、射精前後でも分泌されています。引き続き性行為を行う時は、特にご注意ください。⑤コンドームには表裏があります。表裏を間違えると装着ができません。体液や精子が付着している場合がありますので、表裏を間違えたらそのまま使用せず捨ててください。⑥精液溜りなど先端に空気が入ったまま使用すると破損の原因となりますので、装着時にしっかりと空気を抜いてください。⑦詰まりの原因となりますので、使用したコンドームは水洗トイレに流さないでください。

この製品は、取扱い説明書を必ず読んでからご使用ください

『SPL7013』とは この製品の潤滑剤に 0.5% 配合されている『SPL7013』は、ASTM E 1052 準拠試験において HIV および HSV に対し抗ウイルス作用が確認されています。ただし、臨床における抗ウイルス作用は確認されていません。

使用方法

①個別包装内のコンドームを端に寄せ、反対側に出来た十分なスペースを完全に切り離し、コンドームにキズをつけないように取り出してください。(図1) ②コンドームの表裏をよく確認した上で、精液溜りなど先端部分を指の腹でつまんで空気を抜いてから亀頭に密着するように置いてください。(図2・図3) ③コンドームをゆっくりと両手の指でペニスの根元に向かってころがしながら(図4) 根元までかぶせてください。(図5) ④射精後は、速やかにペニスの根元部分のコンドームをはずれないように押さえながら、ゆっくりと膣外に抜き出してください。⑤使用したコンドームは、各自治体の処分方法に従ってください。

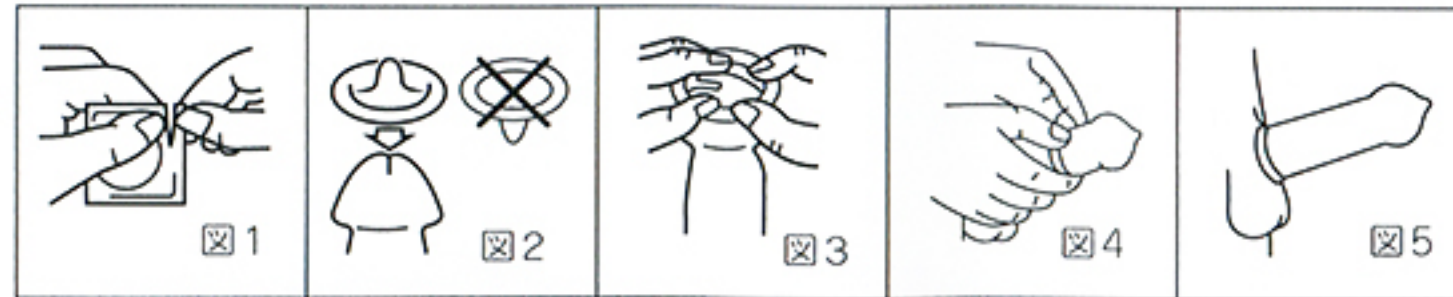

使用上の注意

重要な基本的注意

①コンドームの使用は、1 個につき 1 回限りです。その都度、新しいコンドームをご使用ください。②コンドームの適正な使用は、避妊に効果があり、エイズを含む他の多くの性感染症に感染する危険を減少しますが、100% の効果を保証するものではありません。③この製品は天然ゴムラテックスを素材にしています。天然ゴムラテックスは、かゆみ、発赤、じんましん、むくみ、発熱、呼吸困難、ぜんそく様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。④コンドームの使用中に、破損や精液漏れ等により膈内への精子の進入が疑われる場合、緊急避妊という方法により妊娠を回避できることがあります。その際は、可能な限り速やか(遅くとも72時間以内)に、産婦人科医等を受診してください。

相互作用

①膈内に挿入する坐剤、外部性器に塗布する軟膏などの医薬品や口紅、ハンドクリームなどの油性物質と接触すると、コンドームが劣化し、破れる危険があります。コンドームの使用時には、これらと接触しないよう注意してください。②市販の潤滑剤の中には、コンドームの破損の原因となるものがありますので、追加で潤滑剤を使用する際は、コンドームメーカーの潤滑剤をご使用ください。

その他の注意

①性交中に違和感(脱落及び必要以上の伸びなど)を感じたときは、破損に通じるおそれがあるので、使用を中止してください。②個別包装が明らかに損傷している場合は、それを廃棄して、新しいものを使用してください。③このコンドームはペニスに装着し、膈内に挿入する性行為に適用するように設計されています。これ以外の用途での使用は破れる危険があります。④使用期限を過ぎたコンドームは破れる危険がありますので使用しないでください。

保管方法

①次の場所に保管しないでください。a) 直射日光のあたる場所 b) 高温多湿の場所 c) 防虫剤などの揮発性物質のある場所②購入時の包装に入れたまま保管し、その都度、取り出してください。個別包装のまま携帯しないでください。

製造販売元



オカモト株式会社

URL: <https://www.okamoto-inc.jp>

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目27番12号

お客様相談室 TEL 03-3817-4226

受付時間 9時～17時 土日祝日年末年始を除く