

腔内用スツキリジェル 腔内浄化をサポート

乳酸配合の弱酸性ジェルが腔内にゆっくり広がり、少ない量で
気になる腔内を清潔にします。

【配合成分】

精製水、グリセリン、ヒドロキシエチルセルロース、乳酸、クエン酸ナトリウム、
パラオキシ安息香酸メチル、エデト酸二ナトリウム、ヒアルロン酸ナトリウム

衛生的な使い捨てタイプ 簡単に使いやすい ワンプッシュ設計

抵抗感の少ない流線型

滑らかなフォルムの容器で
スムーズに挿入できます

軽く押せるピストン

軽い力で最後までゆっくり
押し出せます

コンパクトサイズ

化粧ポーチに入る大き
さで、携帯にも便利

PP素材

環境にもやさしいPP素材
を使用

無香・透明ジェル

ご使用方法



1.包装の上端のギザ
ギザを切り、容器を
取り出します。



2.キャップを指で折
るようにして引き抜
きます。



3.容器を持ち、身体
をリラックスさせた
状態で、シリンジの
先端から5cm～8
cmを腔に挿入しま
す。




4.ピストンを押し出
し、洗浄液を注入し
ます。



5.容器をゆっくり抜
きます。

リラックスできる体勢でご使用ください

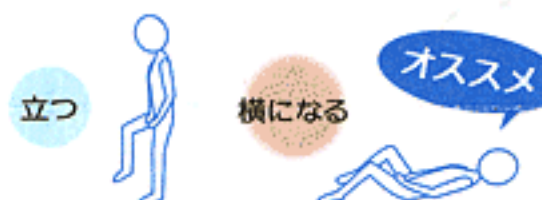

注入後、下着の汚れが気になる方は、ナプキンやライナーを併用してください。

使用上の注意

- ☆本品は、1回1本使いきりタイプの腔洗浄器です。
- ☆妊娠中や局部に炎症等異常のある場合は、ご使用前に医師にご相談ください。
- ☆1日1本を目安にお使いください。
- ☆避妊効果はありません。避妊フィルム等の殺精子剤を使用した後にお使いになると、避妊効果がなくなることがありますので本品のご使用をお止めください。
- ☆ご使用中に万一異常が発生した場合には、ご使用を中止し、医師にご相談ください。ご使用後も症状が続く場合は医師へご相談ください。

再使用禁止

製造販売元

株式会社 ウエットラストジャパン
第二種医療機器製造販売許可番号：13B2X10181
〒160-0023東京都新宿区西新宿六丁目15番地1号
セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿505号

お客様相談室
TEL03-6304-5986(平日10:00～17:00)
(添付文書請求先)

製造元

株式会社 シアイティ 韓国
C.I.T. Co.,Ltd.

販売名：インクリア
一般的名称：腔洗浄器
類別：管理医療機器
医療機器製造販売承認番号：
225AFBZX00021000
内容量：1.7g(標準)3本または10本入り