

2020 年 8 月 7 日作成（第 1 版）

2021 年 12 月 8 日作成（第 2 版）

2025 年 4 月 10 日作成（第 3 版）

医療機器製造販売届出番号
13B3X10286000001

機械器具 48 注射筒

一般医療機器 家庭用精液注入用シリンジ 64137001

meeta（ミータ）

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止（本品及び付属品とも）

【形状・構造及び原理等】

[構成]本品は付属品として採精容器を含む

[形状・構造]

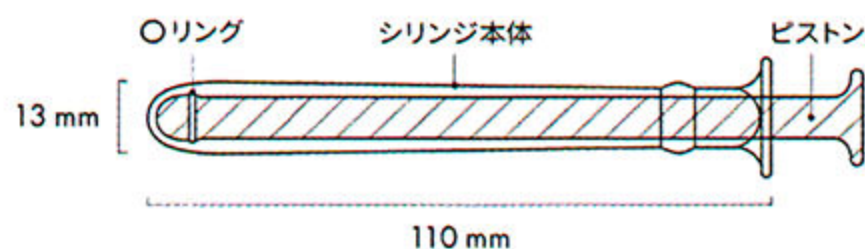

[原材料]シリンジ本体：ABS 樹脂、ピストン：ポリプロピレン、Oリング：シリコン樹脂、採精容器：紙

【使用目的又は効果】

家庭において、妊娠を目的としたシリンジ法にて腔内に精液を注入するために用いる。本品は単回使用である。

【使用方法】

1. 採精容器に精液を採取する
2. 採取した精液をシリンジ本体の先端開口部から、ピストンを引いて吸引する。
3. シリンジ本体を腔内に挿入し、ピストンを押して精液を注入する。
4. 精液の注入後、シリンジ本体を腔から抜去する。

【使用上の注意】

- 使用目的以外の使用はしない
- 使用前には手洗いをし、清潔な環境で使用する

- 再使用や、不衛生に扱うと感染などのリスクにつながるおそれがあります
- 本品は添付文章を読み、指示に従って使用すること
- 開封は使用直前に行うこと
- 万一、包装が破損している場合は使用しない
- 使用期限を過ぎた製品は使用しない
- 精液は採取し液状化（5～10 分程度放置）後、速やかに注入する
- 痛みを感じるときは無理せずに使用を中止すること
- 使用後は速やかにシリンジを廃棄する
- 3 か月間連続で使用しても妊娠に至らない場合は医師の診察を受けること
- 使用に不安を感じる場合は、使用前に専門医に相談すること

【保管方法及び有効期間】

<保管方法>

- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- 本品は指示された方法で保管すること。不適切な保管は劣化や破損の原因になる。

<有効期間>

使用期限は製造より 5 年間（自己認証による）

<廃棄方法>

使用後は各自治体のルールに従って分別し捨てること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

パスクリエイト株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-8-4 近鉄新宿御苑ビル 9 階

TEL：0120-905-147（ベビーライフ研究所カスタマーセンター）

E-mail：info@babylife-lab.com

meeta(ミータ)について

meetaは容器の貼り合わせのバリがなく、滑らかで挿入しやすさを考えた、からだにやさしい流線形です。


普段お使いのアプリケーター型タンポンのような、なじみのある形状です。
先端の太いところで直径1.3cm。太すぎず細すぎず安心してお使いいただけます。

一体型容器のため使用中の脱落や精液の漏れを防ぎます。


挿入部位は約8cm、個人差はありますが、膣の長さ(入口から子宮口まで)はおおよそ7~10cm。
子宮頸管を傷つけず、精液を子宮口まで届けるための長さを設計しました。
容器本体の出っぱり部分(★)を持って挿入してください。

※本品は衛生上1回使い切りです。再利用はせず必ず破棄してください。

セット内容

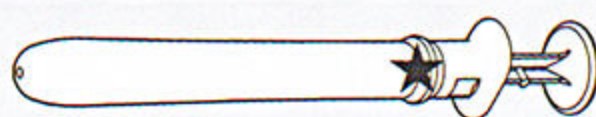

- ・シリンジ本体
- ・ピストン(リング付き)

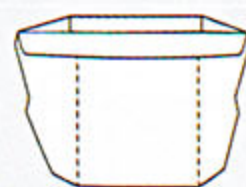

- ・採精カップ

meeta(ミータ)のご使用方法


※初めてお使いの方は必ず動画をご確認ください。

ご夫婦で取り組む3ステップ

STEP
1

精液をカップに出す

ぱかっと広い間口の採精カップに
マスターベーションで射精

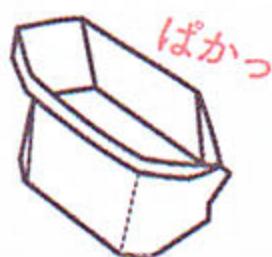

STEP
2

吸い上げる

ぐうーっとmeetaで
吸い上げる



STEP
3

膣内に注入する

膣内にシリンジをする〜っと挿入
精液を注入します



動画は
こちらから!



※注意点

1. シリンジで精液を吸い上げる際に空気を入れないようにご注意ください
2. 精液注入はできるだけ早い方が望ましいですが最大で2時間程置くことも可能です

 ベビーライフ研究所
<https://babylife-lab.com/>