



ファイテン チタンバン

【一般医療機器】

このたびは本商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの取り扱い説明書をお読みください。

一般医療機器 ファイテン チタンバン


製造販売届出番号 26B3X10005000001

家庭用貼付型接触粒

ファイテン チタンバン 効能・効果

首・肩・腰・ひざ・ひじ、
その他の **コリの緩和**

装着部位における

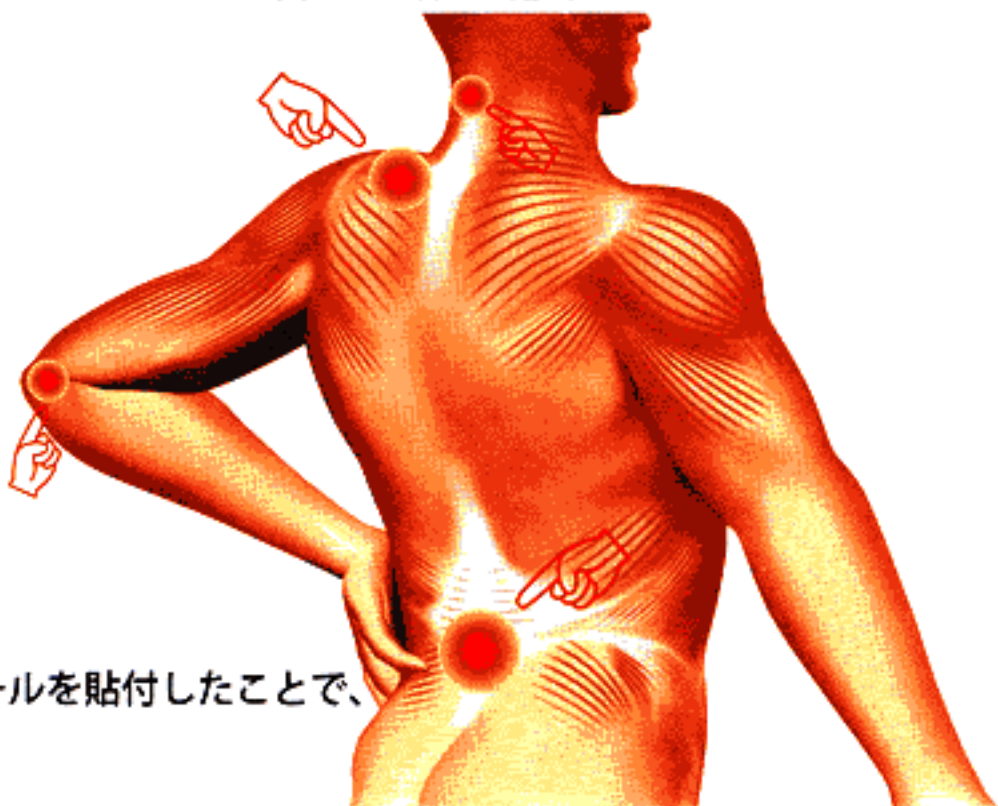

「ファイテン チタンバン」は専用絆創膏に半球型チタンボールを貼付したことで、
身体の凝り部分をゆるやかに刺激し、凝りをやわらげます。

使用上の注意および保管方法

- ・湿疹・かぶれ・傷口・粘膜部分や皮膚の柔らかい部分には使用しないでください。
- ・敏感肌の方、かぶれやすい方は、あらかじめパッチテストを行うことをおすすめします。
- ・使用後、皮膚に貼り痕が残る場合があります。しばらくすると消えますが、体質・体調によってはまれに色素が残る場合もありますので、貼る場所にはご注意ください。
- ・お風呂あがりなど乾いたお肌にご使用ください。
- ・貼ったまま入浴できますが、タオル等で強くこすると皮膚を傷つけたり、剥がれやすくなりますのでご注意ください。
- ・かぶれ・傷などを防ぐため、こまめに交換することをおすすめします。
- ・ご使用中、発疹・発赤・かゆみ等の症状が現れた場合は、ただちに中止し、医師等にご相談ください。
- ・同じ場所に何度も貼り・剥がしを繰り返すと、腫れや痛みの原因になりますのでご注意ください。
- ・絆創膏から半球型チタンボールを剥がし、交換する際は失くさないよう十分ご注意ください。
- ・本品および、剥がした半球型チタンボールを保管する際は幼児の手の届かないところに保管してください。
万一、誤飲した場合は直ちに医師の指導を仰いでください。
- ・直射日光および高温多湿を避け、湿気の少ない清潔な場所で保管してください。
- ・ご使用中、テープのまわりが黒くなる場合がありますが、石鹸・ベビーオイル等でやさしく洗い落としてください。
- ・長時間使用されますと、ワイシャツ・ブラウス等が黒くなるおそれがありますので、こまめに貼り替える事をおすすめします。
- ・高温になる火・油などを使用する付近では危険防止のため、はずしてください。


ファイテン チタンバン 貼り方 ポイント

コリを感じる場所に貼るのが基本


ファイテンチタンバンを貼るポイントの一部を
ご紹介いたします。全身のポイントについては
販売店にお問い合わせください。
コリを感じる場所に貼るのが基本です。

※本品の効果は、人や症状によって異なります。

首・肩

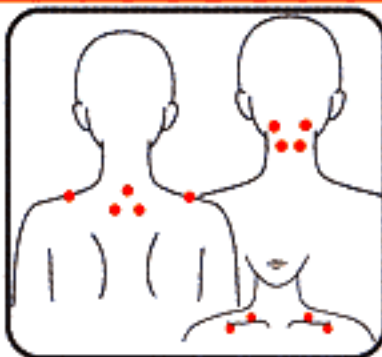


背中・ひじ・腰

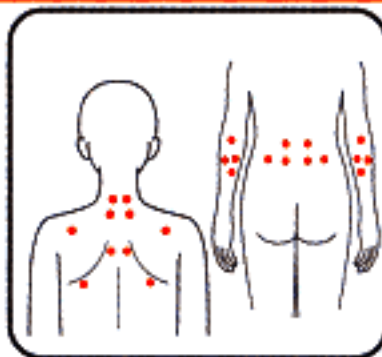


脚・ひざ




替えテープ 使い方

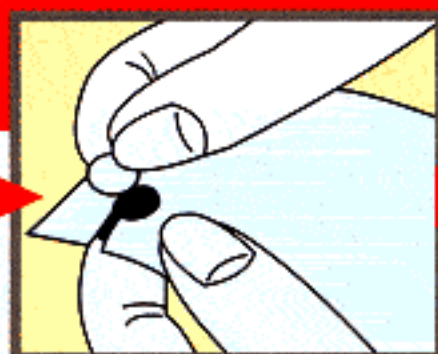


剥離紙(紙シート)の切り込みに
そって、台紙の○型をはがします。

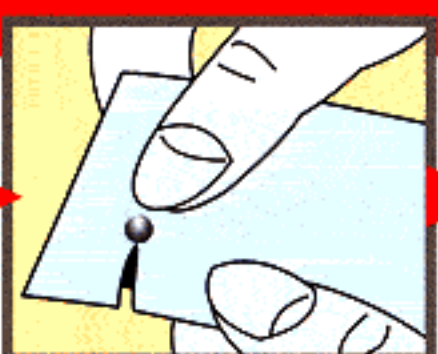

チタン粒の平面の方を下にし、中
心円に合わせて粘着面につけます。

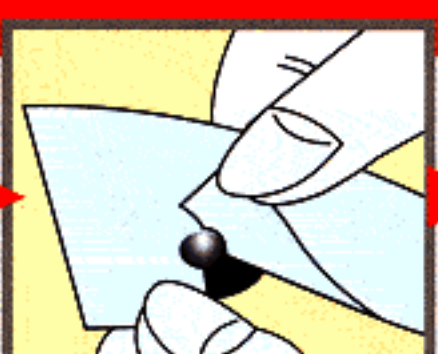

外側の切り込みからぐるりと台紙
をはがします。

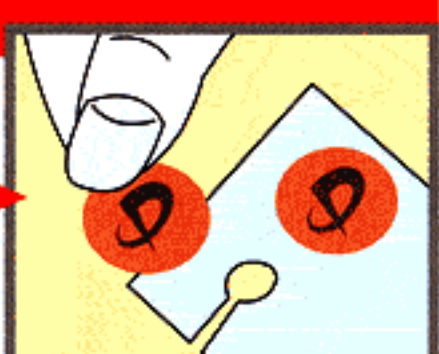

突起状の方を皮膚に密着させ、ご
使用ください。

製造販売元 **ファイテン株式会社**
京都市伏見区羽束師菱川町491-1

お客様相談室 ☎ 0120-510702 【受付時間 AM10:00~PM5:00 / 土日・祝日休み】

器 80 はり又はきゆう用器具

一般医療機器

家庭用貼付型接触粒（JMDN コード 71026000）


ファイテン チタンバン

【警告】
本品および、剥がした半球型チタンボールを保管する際は幼児の手の届かないところに保管してください。万一、誤飲した場合は直ちに医師の指導を仰いでください。[体内で滞留すると開腹手術が必要になる場合があります]
絆創膏から半球型チタンボールを剥がし、交換する際は失くさないよう十分ご注意ください。[誤飲の原因となります]
高温になる火・油などを使用する付近では危険防止のため、はずしてください。[やけど防止のため]

【禁忌・禁止】
・湿疹・かぶれ・傷口・粘膜部分や皮膚の柔らかい部分には使用しないでください。[症状が悪化します]
・目の周囲や粘膜に貼らないでください。[炎症を起こすおそれがあります]

【形状・構造及び原理等】

①構造及び寸法

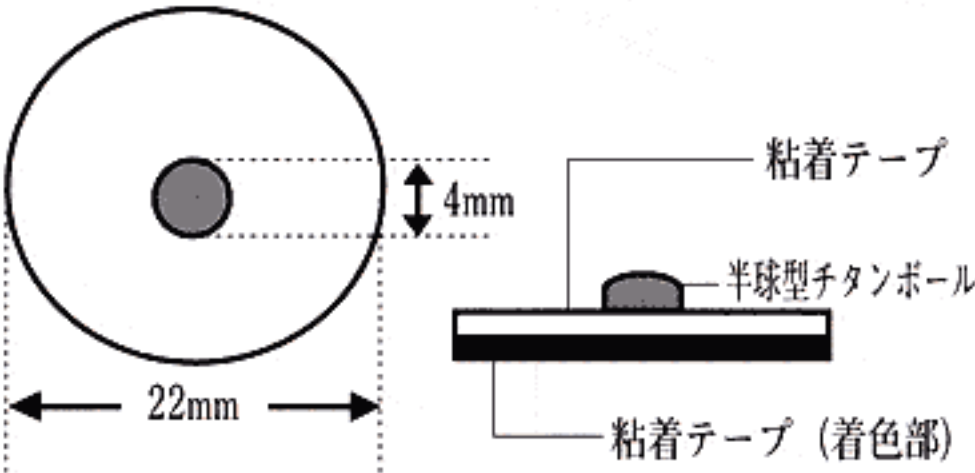

②本体構成

構成名称	原材料名
硬質物	チタン
テープ部 1 層	綿
	ポリエステル
	ポリウレタン
テープ部 2 層（着色部）	炭化チタン
	SBR
	天然ゴム
印刷部	紫外線硬化型インキ
粘着部	アクリル系粘着剤

③原理:身体のコリの部分に貼付し、圧迫することにより「コリの緩解」に使用する。

【使用目的、効能又は効果】

一般家庭において、粘着テープの中央に粒状の硬質物を付し、身体のコリの部分に貼付することにより圧迫し、「コリの緩解」を目的とする器具をいう。本品は一般家庭において使用する。

【使用方法等】

①使用方法

首・肩・腰、その他、コリを感じる部位に、必要に応じて数個貼ってください。

②再使用法

シートの粘着力が弱くなった場合は半球型チタンボールをテープから剥がし、替えテープに貼り替えてからご使用ください。

【使用上の注意】

- ・敏感肌の方、かぶれやすい方は、あらかじめパッチテストを行うことをおすすめします。
- ・使用後、皮膚に貼り痕が残る場合があります。しばらくすると消えますが、体質・体調によってはまれに色素が残る場合もありますので、貼る場所にはご注意ください。
- ・お風呂上りなど乾いたお肌にご使用ください。
- ・貼ったまま入浴できますが、タオル等で強くこすると皮膚を傷つけたり、剥がれやすくなりますのでご注意ください。
- ・かぶれ・傷などを防ぐため、こまめに貼り替える事をおすすめします。
- ・ご使用中、発疹・発赤・かゆみ等の症状が現れた場合は、ただちに中止し、医師等にご相談ください。同じ場所に何度も貼り・剥がしを繰り返すと、腫れや痛みの原因になりますのでご注意ください。
- ・ご使用中、テープのまわりが黒くなる場合がありますが、石鹸・ベビーオイル等でやさしく洗い落としてください。
- ・長時間使用されますと、ワイシャツ・ブラウス等が黒くなるおそれがありますので、こまめに貼り替える事をおすすめします。

【貯蔵・保管方法】

直射日光及び高温多湿を避け、湿気の少ない清潔な場所で保管してください。

【取扱い上の注意】

絆創膏から半球型チタンボールを剥がし、交換する際は失くさないよう十分ご注意ください。

【包装】

1個箱:本体1枚(10マーク)、替え粘着テープ2枚(10マーク×2)、添付文書(取扱説明書)1枚

【製造販売業者名称及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元:ファイテン株式会社
住所:京都府京都市伏見区羽束師菱川町491-1
製造元:ニッポー株式会社
住所:大阪府大東市氷野2丁目3番7号

お問い合わせ窓口 tel:0120-510702
(AM10:00～PM5:00／土日・祝日休み)