

機械器具 81 磁気治療器

管理医療機器

家庭用永久磁石磁気治療器 (71016000)


RAKUWA 磁気チタンネックレス

【禁忌・禁止】

ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方、脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性がある医用電気機器を使用している方は機器の誤作動のおそれがありますので使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

形状：ネックレス

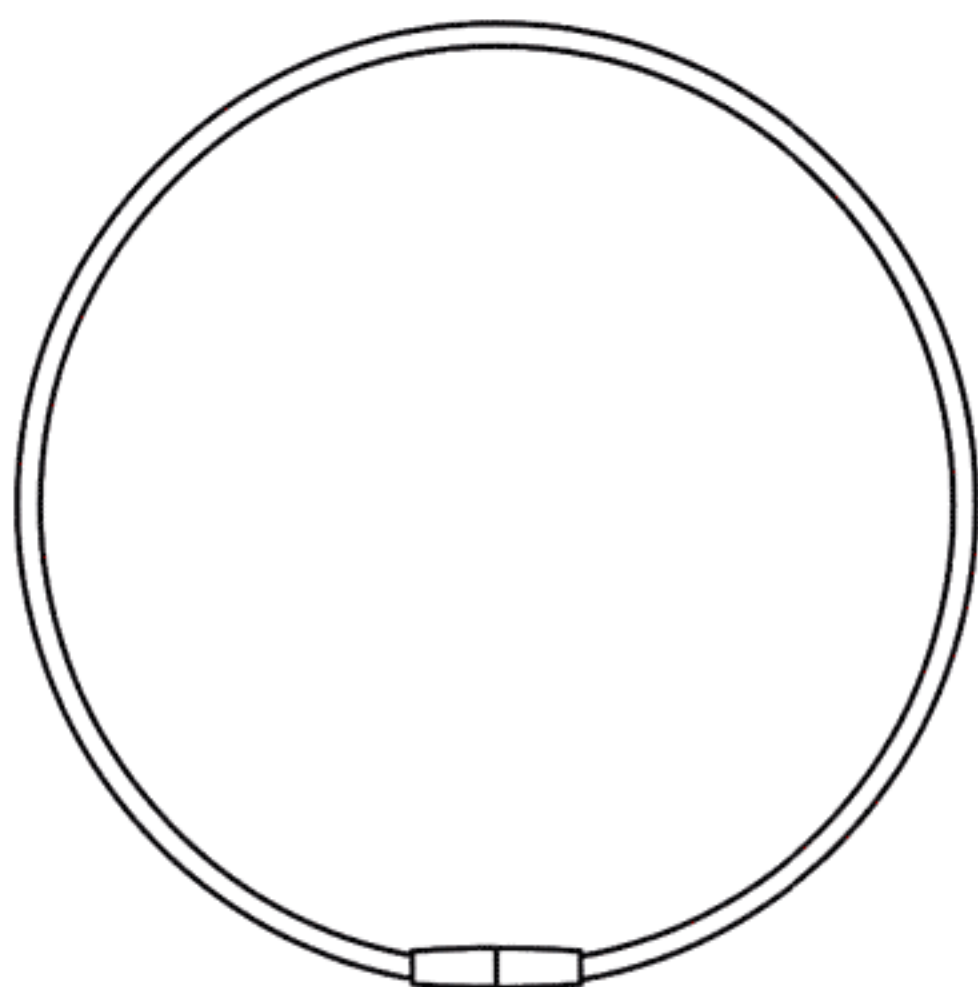

**構成：本体、添付文書

原理：永久磁石の磁気により血行が改善されることを利用した機器である。

**最大磁束密度：50mT(ミリテスラ)

*【使用目的又は効果】

装着部位のこり及び血行の改善。
一般家庭で使用する。

**【使用方法等】

ネックレスとして首に装着します。
(ネックレス以外の用途で使用しないでください)

【使用上の注意】

1. 下記の方は医師にご相談の上でご使用ください。

- (1) 悪性腫瘍のある方
- (2) 心臓に障害のある方
- (3) 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
- (4) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- (5) 皮膚に感染症または創傷のある方
- (6) 安静を必要とする方

(7) 体温38℃以上(有熱期)の方

例1. 急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期。

例2. 衰弱している時。

(8) ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性<とう(疼)痛性>疾患の方

2. 他の治療器と同時に使用しないでください。

3. 使用しても効果が現れない場合は医師などの専門家に相談してください。

4. 使用する前には次のことにご注意ください。

(1) 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。

(2) 異物の付着等がないかご確認の上でご使用ください。

5. 使用中には次のことにご注意ください。

(1) 身体に異常を感じた時は、使用を直ちに中止してください。

(2) 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。

(3) 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける人は、検査の前に使用を中止してください。

6. 機器を廃棄するときには、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

7. 機器は改造しないでください。

**【保管方法及び使用期間等】

小児及び監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

使用に際し、異物の付着等がないか確認の上でご使用ください。常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止し、販売店もしくは発売元お客様相談室 ☎0120-510-702 又は製造販売元までご連絡ください。

【包装】

1個入り

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者：ニッポー株式会社

住所：大阪府大東市氷野2丁目3番7号

代表電話：072-870-8866

製造業者：ニッポー株式会社

住所：大阪府大東市氷野2丁目3番7号

【取り扱い説明】

・高温になる火・油などを使用する付近では、危険防止のため外してください。
・汗・汚れ・ゴミ等が付着した場合、また長期保存される場合は、水またはぬるま湯で手洗いしていただき、自然乾燥させてください。(洗濯、タンブラー乾燥はお避けください。)
・直射日光・高温多湿を避け、常温で保管してください。変色の原因にもなります。
・水や汗で濡れた状態で使用されますと、衣類等に移染する恐れがございますので、早めに乾燥させてください。
・入浴時、就寝時、海水浴時のご使用はお控えください。
・留め具に金属を使用しておりますので、はげしい運動をされる際には危険防止のため外してください。熱をおびやすいため、熱風を吹きつけしないでください。またつけたままの入浴やサウナはお避けください。
・手荒な扱いをしますと変形、破損の恐れがあります。特に強く引っ張る等の行為はお避けください。
・着用時以外の留め具の脱着はお控えください。劣化の原因となる恐れがあります。

【留め具のはずし方】

× 悪い例



留め具を外す際は紐部分を引っ張らないでください。

○ 良い例



留め具部分を持って折るように外してください。

ネック本体を強く引っ張りますと紐及びパーツが破損する恐れがあります。これは一定以上の負荷で壊れる、安全を考慮した仕様でもあります。