

うるおいの
クッションで、
コンタクトが
瞳にやさしく
フィット

コンタクト
レンズ
装着液

ティアレ[®] コンタクト
うるおいフィット

1回使い切りで
いつも清潔

指定医薬部外品



成分


ポリビニルアルコール(部分けん化物) 1.0%
添加物として、ヒアルロン酸Na、無水リン
酸一水素Na、無水リン酸二水素Na、塩化
Na、塩化K、D-マンニトール、pH調整剤
を含有する。

効能・効果

ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタ
クトレンズの装着を容易にする。

用法・用量

- 1.コンタクトレンズの両面を本剤2～3滴
で濡らします。
- 2.そのままレンズを眼に装着します。

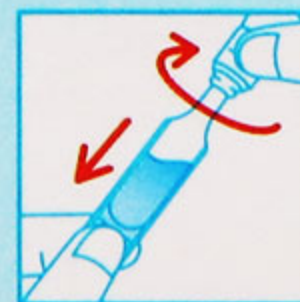

開け方

キャップ部分を軽く引っ
張りながら、ゆっくり
まわしてください。

押してあける



レンズと瞳の間で うるおいのクッションとなり 快適なレンズ装着をサポート

防腐剤フリーで瞳にやさしい

衛生的な1回使い切りタイプ

ヒアルロン酸Naとポリビニルアルコール配合で
レンズがうるおい、乾燥感が抑えられますレンズ装着時にゴロゴロ感や
違和感を感じる方に

使用方法

1 レンズに
直接液を
落とす。
1回2~3滴2 そのまま
レンズを
目に装着
する。すべてのソフト・O₂・ハードコンタクトレンズに使用可能。

注意

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人
 - ・はげしい目の痛み
- ご使用に際しては、箱裏面の使用説明書を必ずお読みください。
- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- コンタクトレンズを装用したまま使用しないでください。

販売名:ティアレワンデー

オフテクス
お客様相談室オフ テ クス
☎0120-021094

受付:月~金(祝日は除く)9:00~17:00

株式会社 オフテクス 神戸市中央区港島南町5-2-4
www.ophtecs.co.jp

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

⚠ 使用上の注意



相談すること

■ 1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状がある人
・はげしい目の痛み

2 次の場合は直ちに使用を中止し、 この文書を持って医師又は薬剤師に 相談してください。


使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 【用法・用量】 1.コンタクトレンズの両面を本剤2～3滴で濡らします。
2.そのままレンズを眼に装着します。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を、まぶた、まつ毛、コンタクトレンズ、指に触れさせないでください。
- (3) コンタクトレンズを装用したまま使用しないでください。
- (4) キャップ部分を軽く引っ張りながら、ゆっくりまわして開封してください。
(勢いよく開封すると、薬液が飛び散る場合があります。)
- (5) 混濁したものや変色したものは使用しないでください。
- (6) コンタクトレンズの装着のみに使用し、飲まないでください。

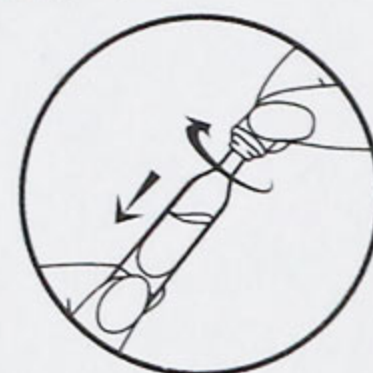

【保管および取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所(1～30℃)で保管してください。冷蔵庫で保管する場合、凍らせないように注意してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 薬液を他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わる恐れがあります。)
- (4) 1本を他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- (6) 本剤を携帯する際、ズボンの後ろのポケット等に入れないでください。
(キャップ部分が折れて開いてしまう恐れがあります。)