


酸素透過性ハードコンタクトレンズ用
洗浄保存液

O₂ SOLUTION

O₂ソリューション

全ハードレンズ対応
きちんと洗浄
フレッシュ密封ボトル

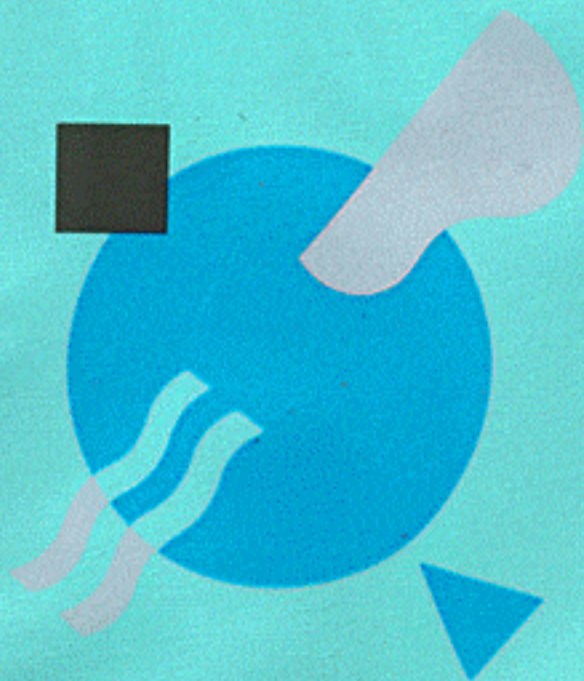

SEED

ご使用前に記載事項を必ずお読みください。
また、ラベルは切り離さないでください。

誤った使用法は十分な洗浄効果が得られないばかりでなく、眼障害等の原因になりますので、必ず記載事項に従い正しいレンズケアを行ってください。コンタクトレンズの取り扱いについては、その添付文書をお読みください。

本液は酸素透過性ハードコンタクトレンズ用洗浄保存液です。タンパク除去には「スーパーブロッター」（別売）を使用してください。

【使用方法】※使用前にキャップを強くしめてボトルを開封します。※レンズを取り扱う前には、手指を石けんできれいに洗ってください。〔洗浄・保存する場合〕①レンズをはずしホルダーに差し込みます。レンズケースに本液を9分目まで入れ、スーパーブロッターを2滴入れます。②キャップを閉め、レンズケースを軽く振り、そのまま2時間以上放置します。〔はめる場合〕③レンズをホルダーに差し込んだまま、水道水で十分にすすいでから装用します。※週1回以上、装用前にレンズに本液を5～6滴たらし親指、人差し指、中指の腹で軽くこするようにして（約15秒）レンズの両面をていねいに洗浄してください。※レンズケースは水道水できれいに洗浄し、自然乾燥してください。

【使用上の注意】●ソフトコンタクトレンズには使用できません。●誤って口や目に入った場合は、大量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。●本液の使用により目や皮フに異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。●使用期限の過ぎたものおよび変質、変色したものは使用しないでください。また、開封後は速やかに使用してください。●一度使用した溶液は再使用しないでください。●容器の口に指や他の容器が触れないようにしてください。使用後は必ずキャップをきちんと閉めてください。●誤使用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えしないでください。●直射日光や高温を避け、小児の手の届かないすずしい場所で保管してください。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

主成分
陰イオン
界面活性剤、
緩衝剤

禁点眼

禁内服

無菌調製液
（除菌ろ過法）



商品についてのお問い合わせは

シードひとみコール フリーダイヤル ミナヒトミ
0120-317103

シードホームページ <http://www.seed.co.jp>

発売元 株式会社 シード 東京都文京区本郷2-40-2

製造元 大木製薬株式会社 東京

0810-AC