

密着型義歯床安定用糊材ークッションタイプ
デンチャーメイトクッション

販売名：
デンチャーメイトクッションB

【禁忌・禁止】

- 次の人は使用しないでください。
- 1) 本品又はアルコールによる過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、はれ等）を起こしたことがある人。
 - 2) 入れ歯が直接ふれるところに荒れ、痛み、傷、はれ等の症状のある人。
 - 3) 食べ物等の飲み込みが困難な人（喉に詰まる恐れがある）。

認証番号：
303AABZX00047000号
歯科材料05
歯科用接着充填材料
管理医療機器
JMDNコード：16388020

形状・構造及び原理等

- 【成分】酢酸ビニル樹脂、無水エタノール（アルコール含有）
【形状】淡赤色のペースト
【原理】入れ歯と口腔粘膜とを吸着力（陰圧）で維持させる
【品目仕様】密着強さ 5kPa以上、pH値 4～10


使用目的

義歯の安定

使用方法等

1. 使用方法

- 1) 入れ歯をきれいに洗い、よく拭いて水分を完全に
取り除いてください。

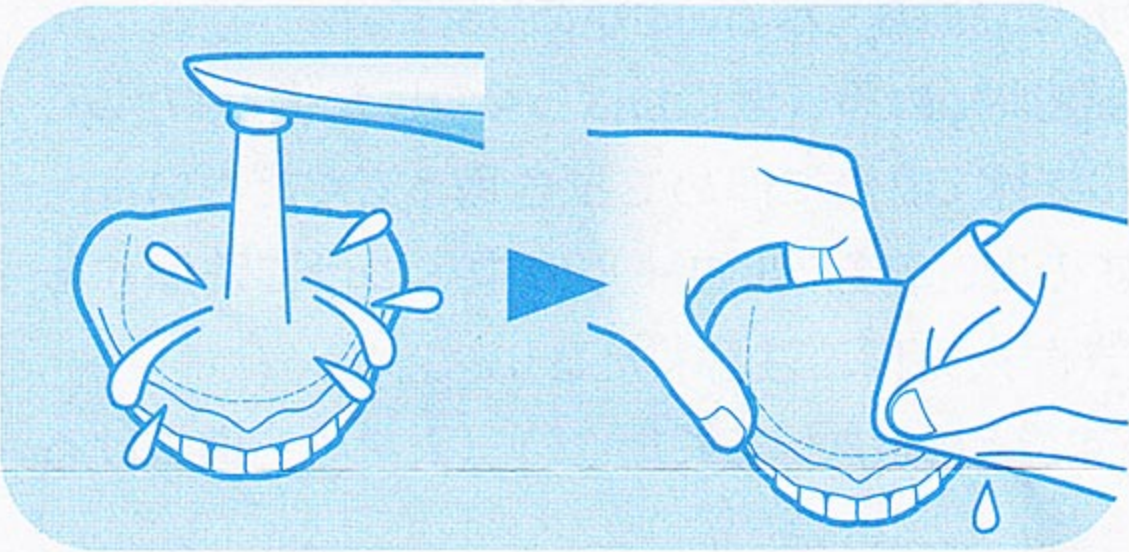


- 2) 付属の巻き上げ器具を使い、本品を下図のように
絞り出し、指で切り取ってください（1回量は上下と
も1cm球が適量）。




- 3) 適量を、入れ歯の歯ぐきにあたる部分に重点的に
ぬり、溝の部分に広げてください。




- 4) ぬり終わったら、水をかけてください。

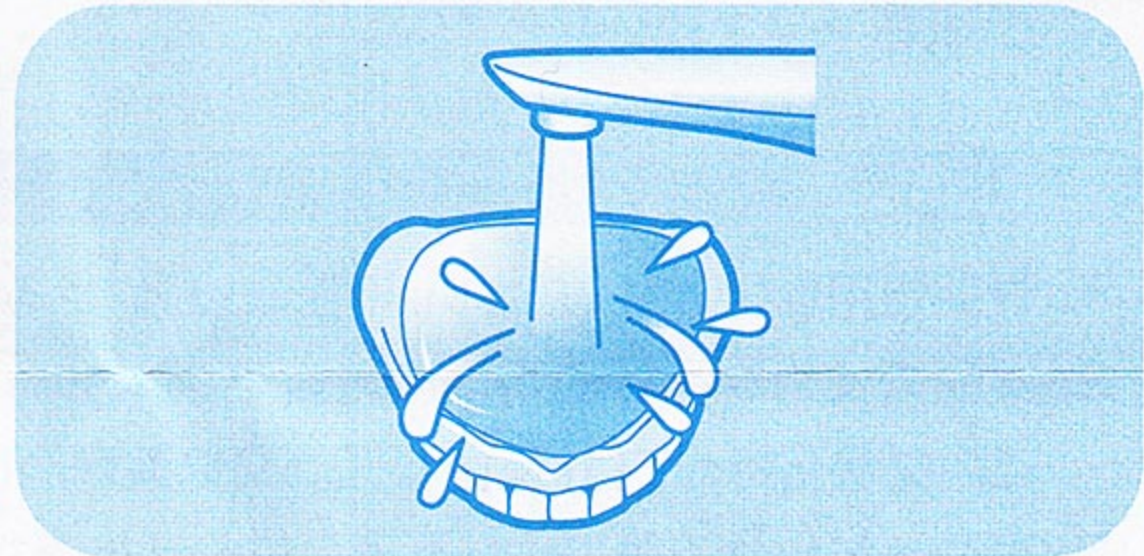

- 5) 入れ歯をはめて、2～3回かみしめてください。

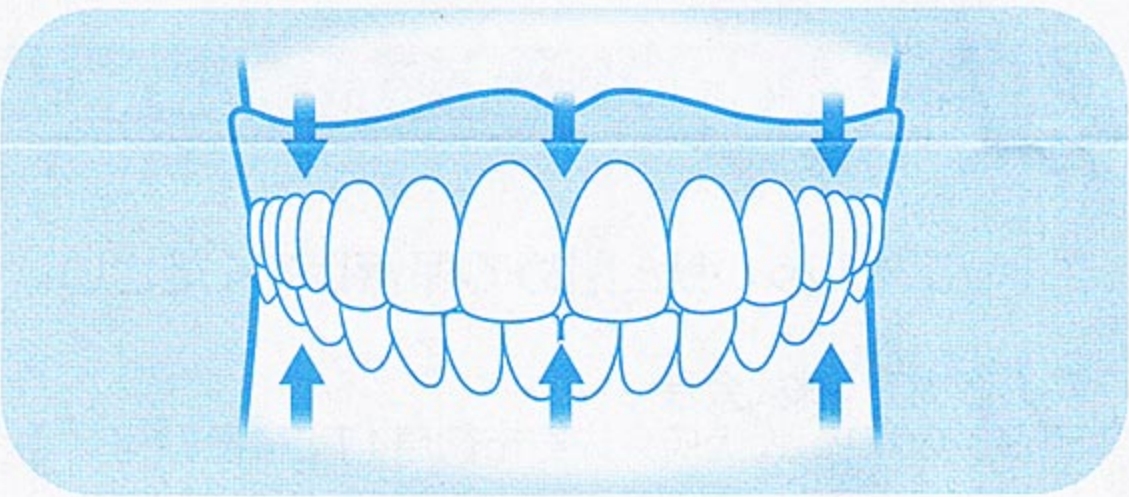

- 6) 入れ歯からはみだした部分がある場合は、下図の
ように入れ歯のふちをテコにして切り取り、あとは
よくおさえてならしてください。

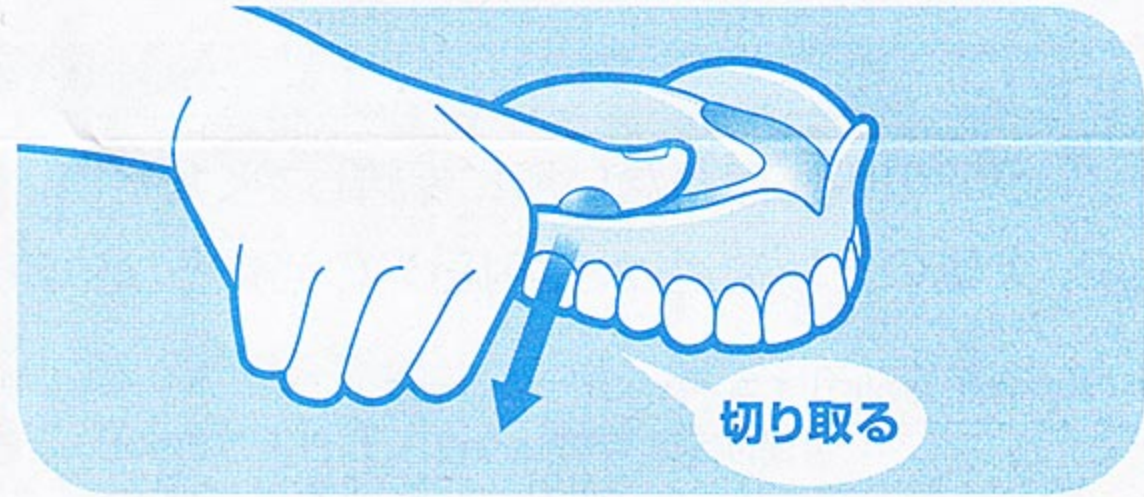

2. 使用可能な入れ歯の材質、種類

○：使用可能 ×：使用不可

入れ歯の材質		入れ歯の種類		
プラスチック床	金属床	総入れ歯	部分入れ歯*	ブリッジ・さし歯
○	×	○	○	×

*一部の部分入れ歯には使用できません。

付属の「巻き上げ器具」を使って安定剤を絞り出してください

※「巻き上げ器具」をお使いいただくと少しの力で最後まで絞り出しやすくなります

チューブのキャップを付けたまま「巻き上げ器具」の切れ込みにチューブの端を差し込みます。



チューブのキャップを取って「巻き上げ器具」をまわしながら安定剤を絞り出します。



※必要以上の力を加えないでください。チューブが破損する恐れがあります。

使用方法に関する注意

1. 本品を付け替え無しに、6日以上は使用しないでください。
(菌の繁殖等、口腔衛生上良くないことがあります。また、はがれ難くなります。)
2. 使用中又は使用後に注意すること。
 - 1) 口の中に刺激を感じる場合は、水で軽くすすいでから使用してください。なお、水を流しても強い刺激が残る場合には、使用を中止してください。
 - 2) 本品をつけた入れ歯は就寝時にはずしてください。
 - 3) 本品をつけたまま入れ歯を乾燥させないでください。入れ歯をはずしたら、必ず水又はぬるま湯に浸しておいてください。(固まってはがれ難くなったり、はがれなくなることがあります。)
 - 4) 本品を取りかえる際、入れ歯に残って取れにくい場合は、ぬるま湯にしばらくつけた後、はがしてください。それでもはがし難い場合は、アルコールを水で2倍に薄めて拭き取ってください。なお、入れ歯が変形または破損することがありますので、直接アルコールの中へつけて洗浄することはさけてください。アルコールを使用するときは火気にご注意ください。
 - 5) はがし難い場合に、金属などを使用して無理にはがすことはしないでください。(入れ歯を傷つけることがあります。)
 - 6) チューブから出しにくい場合は、キャップを閉めたままチューブの先の部分をぬるま湯につけると出しやすくなります。

使用上の注意

1. 長期連用しないでください。(歯ぐきがやせる、噛み合わせが悪くなる場合があります。)
2. 本品の使用中止又は使用後に発疹・発赤、かゆみ、はれ等の症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
3. 歯ぐきがやせる等により不適合になった入れ歯を本品で安定させるのは一時的な場合とし、できるだけ早く歯科医師に入れ歯の調整を相談してください。
4. 口腔状態によりうまく安定しない場合があります。

保管方法

1. 小児の手が届かない所に保管してください。
2. 火気のそばを避け、直射日光の当たらない涼しい所に、キャップをしっかりと閉めて保管してください。

お客様相談窓口 TEL. 06-7670-7115
受付時間：月曜日～金曜日(土、日、祝日を除く)
午前9時～12時 午後1時～5時
株式会社 共和
〒557-0051 大阪府大阪市西成区橘3丁目20番28号

製造販売元：株式会社 共和
〒598-0071 大阪府泉佐野市鶴原4丁目4番81号
製造元：株式会社 共和
〒557-0051 大阪府大阪市西成区橘3丁目20番28号

- 歯ぐきがやせる等により不適合になった入れ歯を本品で安定させるのは一時的な場合としてください。
- 定期的に歯科医師の診察を受け、必要な場合は入れ歯の調整を行ってください。
- 本品の長期連用はしないでください。