




コンドームの新時代の幕開け、これからは「気持ちよさ」で選ぶ時代へ

ゴム感が消える、 ステルスゼリー完成。

最高の一体感で得られる極限のSEX、それがZONE体験。

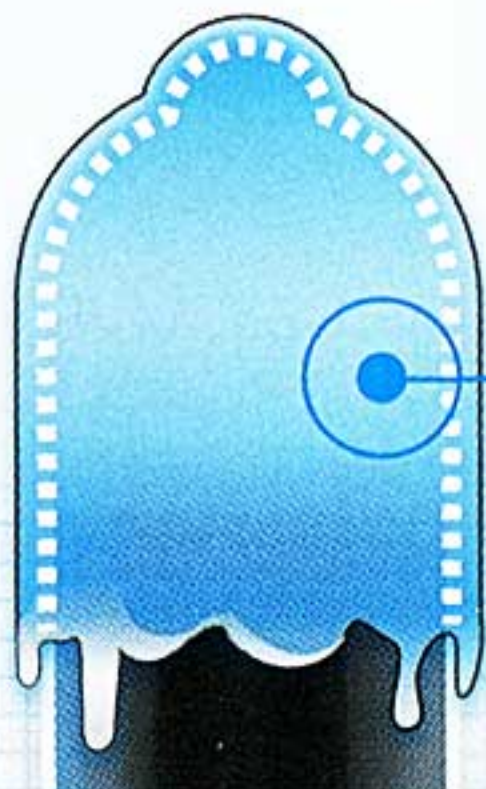

Stealth jelly▶▶▶▶

ジェクス独自開発の新処方ゼリーで
ゴムの装着感を限りなく0に近づける
ステルスコートを実現！

2017年2月 第5版
2016年1月 第4版

取扱説明書

認証番号:外箱に表示

【使用方法】 1.個包装内のコンドームを端に寄せ、反対側にできた十分なスペースを完全に切り離しコンドームにキズをつけないように取り出してください(図1)。2.コンドームの表裏をよく確認した上で、亀頭に密着するように置いてください(図2)。本品は、コンドーム先端の空気を抜く必要はありません(図3)。3.コンドームをゆっくりと、両手の指でペニスの根元に向かってころがしながら、根元までかぶせてください(図4)。4.射精後は、速やかにペニスの根元部分のコンドームをはずれないように押さえながら、ゆっくりと膣外に抜き出してください。5.使用したコンドームは、各自治体の処分方法に従ってください。

【使用方法に関する注意】 ①爪や歯、開封時の個包装のカド、その他硬いものに強く触れないようにしてください。その時のキズが使用中の破損の原因となります。②コンドームは性器接触前にペニスが勃起状態になってから装着してください。③性感染症は接触感染ですので、コンドームは必ず性器接触の前に装着してください。④避妊を目的とする場合でも、はじめから装着してください。精子は射精時だけでなく、射精前後でも分泌されています。引き続き性行為を行う時は、特にご注意ください。⑤コンドームには表裏があります。表裏を間違えると装着ができません。体液や精子が付着している場合がありますので、表裏を間違えたら、そのまま使用せず捨ててください。⑥詰まりの原因となりますので、使用したコンドームは水洗トイレに流さないでください。



【使用上の注意】

重要な基本的注意 ①コンドームの使用は、1個につき1回限りです。その都度、新しいコンドームをご使用ください。②コンドームの適正な使用は、避妊に効果があり、エイズを含む他の多くの性感染症に感染する危険を減少しますが、100%の効果を保証するものではありません。③この製品は天然ゴムラテックスを素材にしています。天然ゴムラテックスは、かゆみ、発赤、蕁麻疹(じんましん)、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。④コンドームの使用中に、破損や精液漏れ等により膣内への精子の進入が疑われる場合、緊急避妊という方法により妊娠を回避できることがあります。その際は、可能な限り速やか(遅くとも72時間以内)に、産婦人科医等を受診してください。

相互作用 ①膣内に挿入する坐剤、外部性器に塗布する軟膏などの医薬品や口紅、ハンドクリームなどの油性物質と接触すると、コンドームが劣化し、破れる危険があります。コンドームの使用時には、これらと接触しないように注意してください。②市販の潤滑剤の中には、コンドームの破損の原因となるものがありますので、追加で潤滑剤を使用する際は、コンドームメーカーの潤滑剤(リューブゼリー等)をご使用ください。

【その他の注意】 ①性交中に違和感(脱落及び必要以上の伸びなど)を感じたときは、破損に通じるおそれがあるので、使用を中止してください。②個包装が明らかに損傷している場合は、それを廃棄して、新しいものを使用してください。③このコンドームは男性のペニスに装着し、女性の膣内に挿入する性行為に適用するよう設計されています。これ以外の用途での使用は破れる危険があります。④使用期限を過ぎたコンドームは破れる危険がありますので使用しないでください。

【保管方法】 ①下記の場所に保管しないでください。

- a)直射日光のあたる場所 b)高温多湿の場所
- c)防虫剤などの揮発性物質のある場所

②購入時の包装に入れたまま保管し、その都度、取り出してください。個包装のまま携帯しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ジェクス株式会社 大阪府大阪市中央区谷町2丁目3番12号

お客様相談室 ☎ 06-6942-4416 (土・日・祝日を除く9:30~17:00)

ホームページアドレス <http://www.jex-inc.co.jp/>

取扱説明書及び外箱の表示を必ずお読みください。