

# sagami original 002

## サガミ オリジナル クイック

製造販売元: 相模ゴム工業株式会社 <http://www.sagami-gomu.co.jp>  
〒243-0002 神奈川県厚木市元町2-1  
お客様相談窓口: 046-221-2311(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

### ●使用上のご注意

- ①コンドームの使用は、1個につき1回限りです。その都度、新しいコンドームをご使用ください。
- ②コンドームには爪や歯、開封時の個包装の切れ端、その他硬いものに強く触れないようにしてください。その時のキズが使用中の破損の原因となります。
- ③コンドームは使用する人によって、まれにアレルギー症状を起こすことがあります。アレルギー症状が起きた時は、使用を中止し、医師等に相談してください。
- ④このコンドームはペニスに装着し、膈内に挿入する性行為に適用するよう設計されています。これ以外の用途での使用は破損する危険があります。
- ⑤性感染症は、接触感染ですので、コンドームは必ず性器接触の前に装着してください。避妊を目的とする場合でも、はじめから装着してください。精子は射精時だけでなく、射精前後でも分泌されています。引き続き性行為を行う時は、特にご注意ください。
- ⑥膈内に挿入する坐剤、外部性器に塗布する軟膏などの医薬品、ハンドクリームなどの油性物質と接触すると、コンドームが劣化し、破損する危険があります。コンドームの使用時には、これらと接触しないよう注意してください。
- ⑦市販の潤滑剤の中には、コンドームの破損の原因となる成分が入っているものがありますので、追加で潤滑剤を使用する際は、当社の潤滑剤をご使用ください。
- ⑧使用期限を過ぎたコンドームは破損する危険がありますので使用しないでください。
- ⑨コンドームの使用中に、破損や精液漏れが疑われる場合は、可能な限り速やか（遅くとも72時間以内）に、医師等に相談してください。
- ⑩個包装が明らかに損傷している場合は、それを廃棄して、無傷の個包装から新しいものを使用してください。
- ⑪表裏を間違えたときは、体液や精子が付着している場合がありますので、そのコンドームは使用しないでください。
- ⑫精液溜まりに空気が入ったまま使用すると破損の原因となりますので、装着時にしっかりと空気を抜いてください。
- ⑬性交中に違和感があるときは、破損に通じるおそれがあるので、使用を中止してください。

### ●ご使用方法

- ①コンドームは性器接触前にペニスが勃起状態になってから、ペニスに装着してください。
- ②コンドームは使用直前にプリスターパックの先端を折り、引き上げて取り出してください。このときコンドームに、キズを付けないでください。(図1)
- ③コンドームには表裏があります。赤いテープが出ている面が表面です。コンドームの表裏をよく見てから龟头の上に置きます。(図2)この際、空気を抱きこまないように、コンドームの先端の精液溜まり部分を軽く押さえてください。(図3)
- ④ペニスの先端部にピッタリと密着させたら、龟头部分全体まで手で巻きほぐしてください。(図4)
- ⑤テープの端をつまみます。もう片方の手をペニスに添え、テープをゆっくりとペニスの根元に向かって引きます。(図5)その際、テープが完全に外れるまで引いてください。(図6)
- ⑥コンドームは、ペニスの根元まできちんとかぶせてください。(図7)※ご使用いただく方によってはスムーズに装着できないと感じられる場合もあります。正しく装着できない場合は、その都度、新しいコンドームをご使用ください。
- ⑦射精後は、すみやかにペニスの根元部分のコンドームをはずれないように押さえながら、ゆっくりと膈外に抜き出してください。
- ⑧詰まりの原因となりますので、使用したコンドームは水洗トイレに流さず、各自自治体の処分方法に従ってください。



### ●保管上のご注意

- ①次の場所に保管しないでください。a)直射日光のあたる場所b)高温多湿の場所c)防虫剤などの揮発性物質のある場所
- ②個包装は購入時の包装に入れたまま保管し、その都度、取り出してください。個包装のまま携帯しないでください。

# 人生が変わる!0.02ミリ※ ゴムじゃないコンドーム。サガミ オリジナル

サガミ オリジナル002は、

強度や耐久性、生体適合性に優れたポリウレタンを素材としています。

ポリウレタンはこれらの特長を生かし、人工心臓ポンプの部品や血管カテーテルなど、人間の体内で使用される医療機器に幅広く利用されています。

また熱可塑性に優れた素材ですので、体温が近づくにつれ、  
やわらかくフィットする特性も持っています。

※当社測定

コンドームの適正な使用は、避妊に効果があり、エイズを含む他の多くの性感染症に感染する危険を減少しますが、100%の効果を保証するものではありません。

## サガミ オリジナル002の特徴

### ●うすさ

0.02ミリ※のうすさを実現しています。

### ●強さ

皮膜の強さを表す破裂圧力で、  
当社標準ゴム製コンドームと比較して約3倍※の強度をもっています。

### ●ゴム臭ゼロ

ポリウレタンを素材としていますので、ゴム特有のにおいがありません。

### ●熱伝導性

肌のぬくもりを瞬時に伝える熱伝導性に優れていますので、  
挿入時の違和感を軽減し、自然な使用感が得られます。

※当社測定

### ●なめらかさ

結晶性の高いポリウレタンが均一でなめらかな表面を実現しています。

### ●ゴムアレルギーゼロ

生体適合性に優れたポリウレタン素材を使用していますので、  
ゴムアレルギーにお悩みの方におすすめします。

### ●透明感

透明感が高いので、視覚的にも自然です。

サガミ オリジナル002についてのくわしい情報はこちら

[www.002mm.com](http://www.002mm.com)

**sagami original**  
**since 1998**

サガミオリジナルは、うすい・強い・におわない・熱伝導性が良いなど、  
今までのゴム製コンドームとは全く違う自然な使用感を実現し、1998年に発売を開始しました。  
これからも、さらにうすく、丈夫でやわらかく、進化し続けていきます。