

サガミ オリジナルをご愛用いただいている皆様にポイントサービスプレゼントをおこなっております。
くわしくは、下記URLもしくは二次元コードから「ご愛用ポイントサービス」ページをご覧ください。

https://www.sagami-gomu.co.jp/condom/point_service/index_org.html



二次元コード

愛のアイデア

!!! SAGAMI

製造販売元: 相模ゴム工業株式会社

<https://www.sagami-gomu.co.jp>

〒243-0002 神奈川県厚木市元町2-1

お客様相談窓口:046-221-2311(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

USG999Z4044

販売名:サガミ オリジナル

[取扱説明書]ご使用前に必ずお読みください

幸福の0.01ミリ

ゴムじゃないコンドーム。サガミオリジナル

※当社標準的なうすさ:18ミクロン

※当社測定による

●使用上のご注意

- ①コンドームの使用は、1個につき1回限りです。その都度、新しいコンドームをご使用ください。
- ②コンドームには爪や歯、開封時の個包装の切れ端、その他硬いものに強く触れないようにしてください。その時のキズが使用中の破損の原因となります。
- ③コンドームは使用する人によって、まれにアレルギー症状を起こすことがあります。アレルギー症状が起きた時は、使用を中止し、医師等に相談してください。
- ④このコンドームはペニスに装着し、腔内に挿入する性行為に適用するよう設計されています。これ以外の用途での使用は破損する危険があります。
- ⑤性感染症は、接触感染ですので、コンドームは必ず性器接触の前に装着してください。避妊を目的とする場合でも、はじめから装着してください。精子は射精時だけでなく、射精前後でも分泌されています。引き続き性行為を行う時は、特にご注意ください。
- ⑥腔内に挿入する坐剤、外部性器に塗布する軟膏などの医薬品、ハンドクリームなどの油性物質と接触すると、コンドームが劣化し、破損する危険があります。コンドームの使用時には、これらと接触しないよう注意してください。
- ⑦市販の潤滑剤の中には、コンドームの破損の原因となる成分が入っているものがありますので、追加で潤滑剤を使用する際は、当社の潤滑剤をご使用ください。
- ⑧使用期限を過ぎたコンドームは破損する危険がありますので使用しないでください。
- ⑨コンドームの使用中に、破損や精液漏れが疑われる場合は、可能な限り速やか（遅くとも72時間以内）に、医師等に相談してください。
- ⑩個包装が明らかに損傷している場合は、それを廃棄して、無傷の個包装から新しいものを使用してください。
- ⑪表裏を間違えたときは、体液や精子が付着している場合がありますので、そのコンドームは使用しないでください。
- ⑫精液溜まりに空気が入ったまま使用すると破損の原因となりますので、装着時にしっかりと空気を抜いてください。
- ⑬性交中に違和感があるときは、破損に通じるおそれがあるので、使用を中止してください。

●ご使用方法

- ①コンドームは性器接触前にペニスが勃起状態になってから、ペニスに装着してください。
 - ②コンドームは使用直前にブリストパックの先端を折り、引き上げて取り出してください。このときコンドームに、キズを付けないでください。(図1)
 - ③コンドームには表裏があります。コンドームの表裏をよく見てから龟头の上に置きます。(図2)この際、空気を抱きこまないように、コンドームの先端の精液溜まり部分を軽く押さえてください。(図3)
 - ④コンドームをゆっくりと両手の指でペニスの根元に向かってころがしながら、根元まで被せてください。(図4)このとき、ペニスとコンドームの間に空気を抱きこまないように密着させてください。
 - ⑤射精後は、すみやかにペニスの根元部分のコンドームをはずれないように押さえながら、ゆっくりと腔外に抜き出してください。
 - ⑥詰まりの原因となりますので、使用したコンドームは水洗トイレに流さず、各自治体の処分方法に従ってください。
- ## ●保管上のご注意
- ①下記の場所に保管しないでください。
 - a)直射日光のあたる場所
 - b)高温多湿の場所
 - c)防虫剤などの揮発性物質のある場所
 - ②個包装は購入時の包装に入れたまま保管し、その都度、取り出してください。個包装のまま携帯しないでください。

