



ゴロゴロ感を
やわらげる

レンズをつける前に

コンタクトレンズ装着薬

1DAY・カラコン・ハードを含むすべてのレンズに使えます。

ワンデーモイスイン 使用説明書

コンタクトレンズ装着薬

販売名:メニコンフィット

指定医薬部外品

- ご使用前には、必ずこの使用説明書をよく読み、表現や内容等でわからないことがあれば必ず医師、薬剤師または登録販売者に相談し、よく確認してからご使用ください。
- この使用説明書は大切に保管してください。
- この使用説明書に記載された事項は必ずお守りください。
- 本剤使用により少しでも異常を感じたら、直ちに医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
- コンタクトレンズの取扱いについてはレンズの添付文書をよく読み、その使用方法などを守ってください。
- コンタクトレンズを取り扱う前に、よく手を洗い清潔にしてください。

特徴

うるおいのベールでレンズの汚れをブロック

うるおいのベールがレンズと瞳の間でクッション作用を発揮しレンズ装用時のゴロゴロ感をやわらげます。また、レンズに付着しやすいタンパク汚れや脂質汚れもブロックし、快適なレンズ装用をサポートします。

ワンデーレンズを含むすべてのコンタクトレンズに使えます

レンズメーカーだからこそ、瞳へのやさしさとコンタクトレンズとの相性にこだわりました。だから、ワンデーレンズを含むすべてのコンタクトレンズ装用者の方々にお使いいただけます。

使用上の注意



相談すること

1.次の人はご使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)次の症状のある人…はげしい目の痛み。

2.ご使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この使用説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関連部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

効能又は効果

ハードコンタクトレンズまたはソフトコンタクトレンズの装着を容易にする。

用法及び用量

本剤の1～3滴で、コンタクトレンズの両面をぬらして装着してください。
※装着後、液が目から溢れた場合には、清潔なガーゼなどで軽く拭き取ってください。成分の結晶が目周囲に付着することがあります。



用法及び用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をコンタクトレンズ、滴下後の液面、指に触れさせないようにしてください。
(汚染や異物混入の原因となります。)また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。(点眼できません。)
- (4) 用法・用量を厳守してください。

成分及び分量(1mL中)

[有効成分]	有効成分	分量
	塩化ナトリウム	6mg
	ポリビニルアルコール(部分けん化物)	10mg
	ヒプロメロース	7.5mg
	タウリン	1mg

[添加物] エデト酸ナトリウム水和物、リン酸水素ナトリウム水和物、リン酸二水素ナトリウム、ヒアルロン酸ナトリウム、D-マンニトール、塩酸ポリヘキサニド

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(品質を保持するため、車中・暖房器具の近くなど高温となる場所に保管しないでください。)
- (2) 小さなお子さまの手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側に白くつくことがあります。このような場合には清潔なガーゼなどで軽く拭き取って使用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意等に従い、2～3カ月を目安にご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



※ワンデーモイスインの容器は、透明フィルムで密封包装されています。
フィルム破れ等の不審な点が見られた場合は、メニコンお客様センターへご連絡ください。

製造販売元 株式会社メニコン 名古屋市中区葵三丁目21番19号

メニコンお客様センター

0120-103109 www.menicon.co.jp

受付時間/9:00～18:00 ※日・祝日を除きます。