


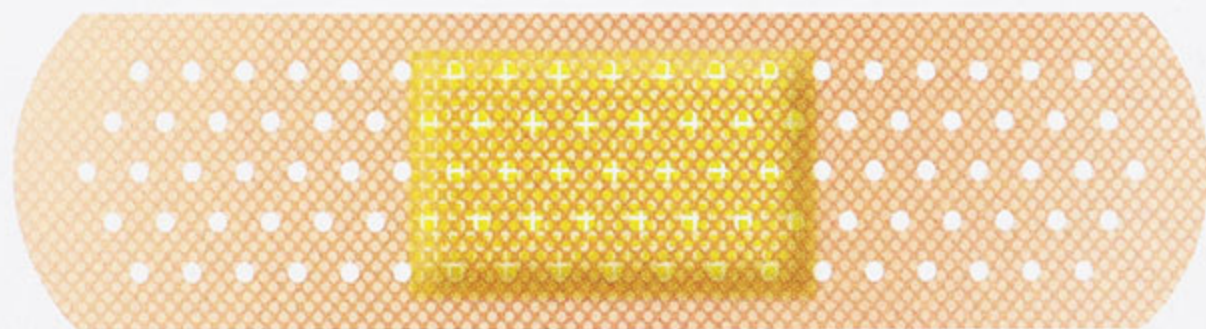

BBテープA

効能：すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護



指定医薬部外品



- 強い粘着力で水仕事も安心です
- アクリノール付のパッドが、やさしく傷を守ります
- 半透明テープなので、目立ちにくい

スタンダード

この箱に記載してある説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合には、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談すること

本品の使用後又は使用後、 次の症状があらわれた場合	関係部位	皮 膚
	症 状	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果 すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)

用法・用量 剥離紙をはがしパッドの部分を患部に当て貼付する。

△〈用法及び用量に関連する注意〉

(1) 用法、用量を守ること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。(4) 長時間貼付したり、急激にはがしたりしないこと。(皮膚刺激の発生原因になります)(5) 刺激に弱い目の周囲、顔面等やわらかい皮膚面には注意して使用すること。(6) 粘着面を患部に貼らないこと。

成分・分量 パッド中にアクリノール水和物0.5%を含有する。

内 容 72mm×19mm(パッドサイズ23mm×12mm)

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない、涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 本剤を使用しても症状の改善がみられない場合には、使用を中止すること。(4) アクリノールの消毒効果を弱めるので、ヨードチンキと同時に使用しないこと。(5) アクリノールは光によって変色するので、使用しないときは遮光または箱に入れて保管すること。

