

鼻づまり・鼻水の原因 花粉・雑菌 洗い流す

鼻うがい ハナノア シャワータイプ

初めての方にも
鼻から出すタイプ

体液に近いから
痛くない

ミントの香りで
スッキリ!



2023年4月作成
(第1版)
Nasal Wash

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください

届出番号 04B2X00009001012

機械器具55 医療用洗浄器

一般医療機器 家庭用鼻腔洗浄器(JMDNコード 71122001)
ハナノア b

形状・構造及び原理等

ノズルキャップ部
(ポリエチレン)
チューブ部
ボトル本体部



【形状及び構造】ボトル状で
鼻腔内に挿入するための
供給突起を有し、ノズル
キャップ部(ポリエチレン)
とチューブ部、ボトル本体部
の3部品から構成される
【原理】外鼻孔から洗浄液を
流し込んで鼻腔内を洗浄
する家庭用鼻用洗浄器

使用方法等

1.器具に液を入れる

目盛り線(50mL 両鼻分)を目安に洗浄液
を入れ、チューブを装着したノズルキャップ
をつけてください
容器内のチューブが下向きになっているの
をご確認ください
(▽△のマークが合うように最後までギュッ
とキャップを閉めこんでください)

2.液を鼻の中に流し込む

ボトル本体の▽のマークがある方を上に洗浄
器具を持ち、鼻の穴にフィットさせてください
図のように少し下を向き、ボトル本体の中
央部を押して洗浄液を鼻の中に流し込み、
左右の鼻を洗浄してください
※洗浄液は同じ鼻の穴や、口からも出ます
口に流れ込んだ洗浄液は、吐き出してください
●1日1〜3回を目安に使用してください

●上手に洗うポイント

「アー」と声を出しながら流し込むと、耳の奥に洗浄液が流れに
くなくなり、無理なく鼻うがいができます

●使用方法に関する注意

(1)上を向いて使用しないでください
また洗浄後、強く鼻をかまないでください
[耳の内部に洗浄液が入り、中耳炎に
なる恐れがある](2)洗浄液の逆流を防ぐ
ため、ノズルを鼻から外した後に手をゆめ
めてください(3)洗浄液が鼻や口から流れ
落ちますので、洗面台等で使用すること
をおすすめします(4)洗浄液を勢いよく
流し込んだり、鼻から洗浄液を強く吸い
込むと、鼻に痛みを感じる場合があります

鼻に入れたまま
手をゆめめない



洗浄液を使い切った際は、「ハナノア専用洗浄液」
(別売)をお買い求めください

特徴

1 鼻の奥までしっかり洗える!

たっぷりの洗浄液を反対の鼻から出すことで、
鼻の奥に付着した花粉や雑菌をしっかり洗い
流すことができます

2 鼻にしみない、痛くない!

体液に近い成分でできているので、鼻がツーン
と痛くなりません

3 簡単に鼻うがいができる!

無理なく使えるシャワータイプなので、鼻うがい
が苦手な方でも簡単に鼻うがいができます

4 ミントの香りでスッキリ!

鼻の奥までミントの香りが広がり、スッキリ
爽やかになります

こんな時にハナノアしませんか?



動画で分かりやすい!



初めての方にも
鼻から出すタイプの使い方
左の2次元コードから
動画ページにアクセス
できます

ハナノアデカシャワーの原液は
使用できません



効果

鼻の奥に入り込んだ雑菌や花粉、ほこり等を洗い流します

使用上の注意

(1)7才未満の幼児には使用させないこと。小児(7
歳以上)がご使用される際は、必ず保護者が立ち会い
のもと、使用方法等および使用上の注意をよく読ん
でご使用ください(2)嚥下障害がある方(食べ物や
飲み物を飲み込みにくい方)は使用しないこと[洗浄
液が気管支や肺に入る恐れがある](3)耳鼻咽喉科
の治療を受けている方は、使用前に医師に相談する
こと(4)洗浄後、強く鼻をかまないこと(5)鼻の洗浄
のみに使用し、目や耳には使用しないこと(6)鼻の
炎症、鼻づまりがひどいときは使用しないこと(7)目
に入らないように注意すること。万一、目に入った場合
は、こすらずに、すぐに流水で洗い流し、異常が残
る場合はこの箱を持って医師に相談すること(8)洗浄
液を飲み込み異常が残る場合や、耳の内部に洗浄液
が入り1日以上抜けない場合や、使用中に万一異常
が生じた場合は、この箱を持って医師に相談すること

保管及び取扱い上の注意

(1)お子様の手の届かない所に保管すること(2)直射
日光、高温多湿の場所を避け、冷暗所に密栓して
保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと
[誤用の原因になったり、品質が変わることがある]
(4)使用期限を過ぎた洗浄液は使用しないこと

保守・点検に係る事項

(1)使用後はノズル・チューブを外して洗浄器具を
よく洗って乾かし、清潔な場所で保管してください
(2)熱湯での洗浄、ドライヤー等高温での乾燥は
しないでください[変形の恐れがある](3)洗剤等は
使わず水だけで洗ってください[破損の恐れがある]

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

製造販売元・製造元

仙台小林製薬株式会社

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平4-3

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-06

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

洗浄器具:1個 ハナノア専用洗浄液
成分:精製水、塩化Na、グリセリン、香料、ポリソル
ベート80、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na