

傷に合わせて
自由な大きさに
切って使えます

7.5cm×35cm

くすり付救急ばんそうこう

ニッコーバン[®]
フリーサイズ

指定医薬部外品

実物大

No. 131



ガーゼ付伸縮布製救急ばんそうこう

ニッコーバン[®]
フリーサイズ

必要な大きさにカットしてお使いください。

〈使用例〉

大きな傷を処置するとき



関節部を処置するとき



手作業の指等を保護するとき



- ▲消毒効果を弱めるのでヨードチンキと同時に使用しないでください。
- ▲もしガーゼ部分がぬれたときは、傷の治りが悪くなりますのではり替えてください。
- ▲使用後のり跡が残りましたら、はがしたばんそうこうの粘着面で軽くこするようにしますととりやすいです。

【使用上の注意】よくお読みください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。
使用中または使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

用法に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部を清潔にし、ガーゼ部分を汚さないように注意して使用してください。
- (3) 粘着面を患部に貼らないでください。

その他の注意

- (1) 使用後はがすときは、皮ふを痛めないよう静かにゆっくりとはがしてください。特に風呂上りや湯水の使用後など、皮ふの表面がやわらかくなっていると思われるときは注意してください。
- (2) 皮ふやツメ等に薬剤の黄色い色が残ることがあります。

効能

切り傷、すり傷、靴ずれ、さし傷、かき傷、創傷面の殺菌・消毒・被覆

用法

保護紙をはがし、薬液ガーゼが傷面に当たるようにあて、絆創膏部分で固定します。

成分

薬液ガーゼ100mg中 日局アクリノール水和物0.5mg
添加物としてBHT、流動パラフィン、天然ゴムを含む。

規格

ばんそうこう 7.5cm×35cm ガーゼ3.5cm×35cm

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。



製造販売元

日 廣 薬 品 株 式 会 社

東京都世田谷区北沢4丁目15番1号

お問い合わせ先 ☎03-3468-1311

日本製