

つらくて くり返す

あかぎれ ひび割れに

ガーゼなし丈夫な素材で

密着保護

衝撃に
強い

防水
構造

乾燥を
防ぐ

指先^{サイズ}

布製ばんそうこう

ニッコー
プラチナバン

粘着面:抗菌

日本製



製造販売元

日廣薬品株式会社

東京都世田谷区北沢4丁目15番1号

お問い合わせ先 ☎03-3468-1311

販売名 プラチナバン 品番 No.325

一般医療機器 救急絆創膏

使用目的 創傷面の保護

使用方法 保護紙を取り除き、粘着面で貼る。

包装 指先サイズ (34mm×52mm)

医療機器届出番号 13B3X00099000002

JMDN34864000

再使用しないでください。


【使用上の注意】●本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●直射日光や温度の上がる場所を避け、湿気の少ない涼しい、小児の手の届かない所に保管してください。●はがす時は皮ふを痛めないよう、ゆっくりとはがしてください。●この製品は天然ゴムを使用しています。●天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

添加物 BHT 流動パラフィン プラチナ微粒子

涼しい所に保管してください

日本製 ガーゼがないため 患部に密着し乾燥を防ぐ!!

乾燥し、あかぎれて
割れてしまった傷口

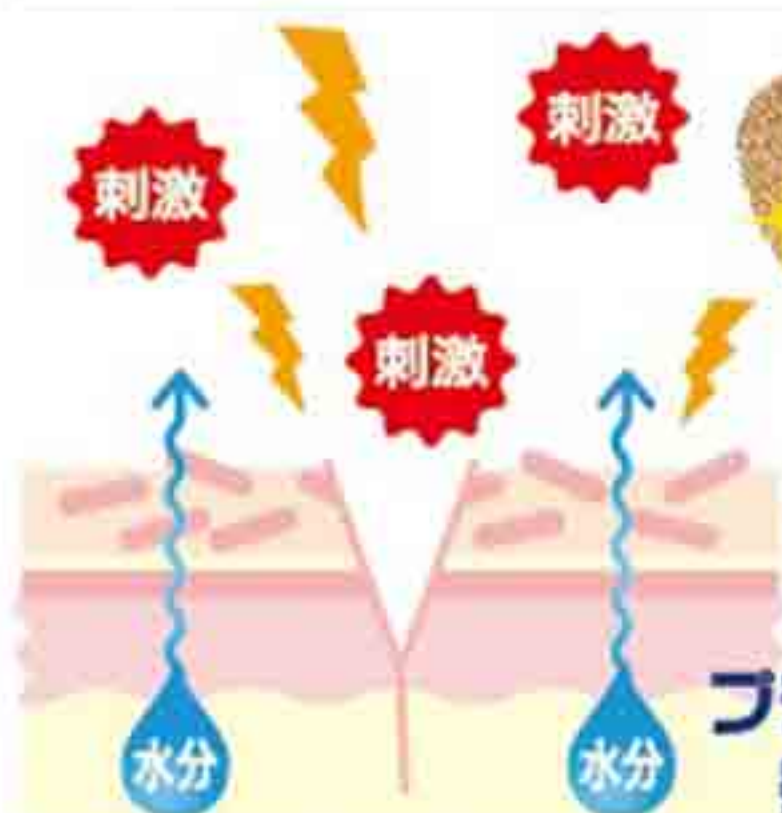

外部から
痛みや刺激が侵入

抗菌成分
プラチナ
配合



プラチナバン

表皮


真皮

プラチナバンを
患部に貼る

プラチナバンで
ガードしている傷口

[防水構造]

布は濡れますが中にはしみ込みません

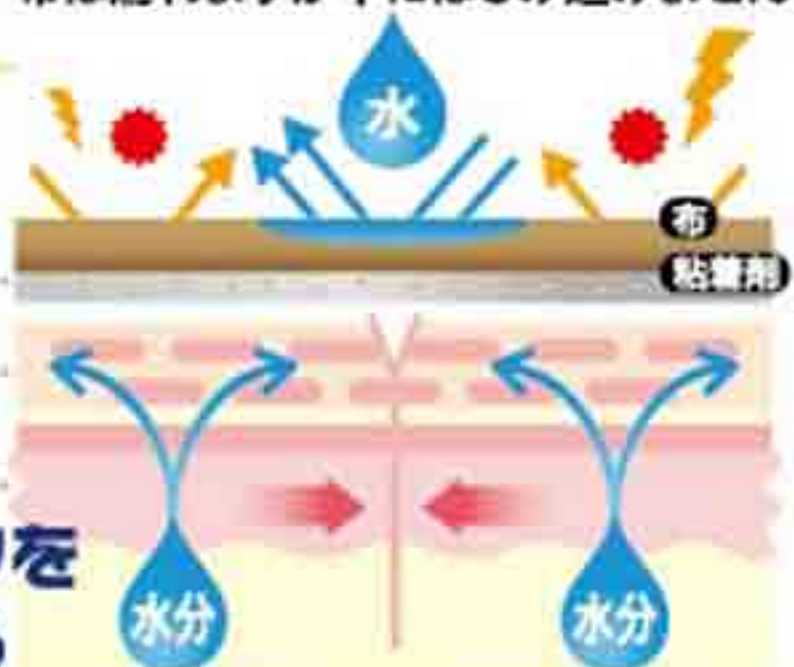

患部を保護し、傷口の
ふさがりを助けます!

こんなお悩みの方に!

- 1日中絆創膏を
貼り替えられない
- 水のしみる痛みが嫌だ
- 患部をしっかり固定し、
衝撃から守りたい
- 絆創膏がはがれて困る
- 患部の衛生が気になる

こんな職業の方に!

- ・野外でのハードな
作業が多い方
- ・調理する方
- ・土木・建築の方
- ・看護師
- ・主婦

指先への
貼り方例



●貼り合わせが爪側になるように
しますとはがれにくくなります



●指先をびったり
保護します

※使用後のり跡が残りましたら、はがした絆創膏の粘着面で軽くこするようになりますととりやすいです。