

シップ剤の固定に便利  
**サロンパスQQ-BOX<sup>®</sup>**  
**シップメイト<sup>®</sup>**

**商品の特長**

- サロンパスQQ-BOX「シップメイト」は、通気性にすぐれた不織布に刺激の少ない粘着剤を塗布し、シップ剤やガーゼ等を固定するために開発された商品です。
- 通気性にすぐれ、カブレにくいです。
- 適度な伸縮性があり、屈伸部位にもピッタリ固定できます。

指・手首



ひざ



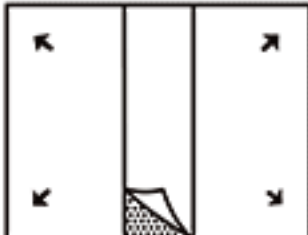
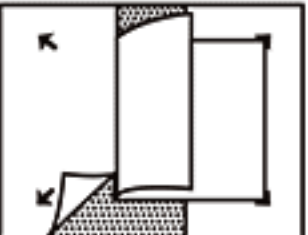
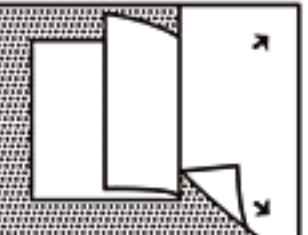
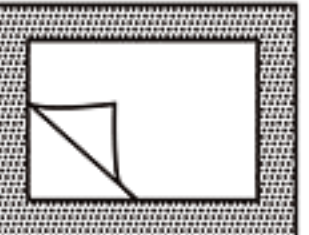
足首



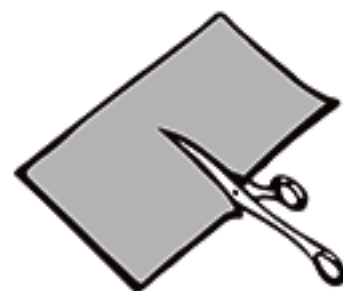
⚠️【使用上の注意】

- 本品の使用により、発疹・発赤（腫脹）、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- 粘膜、湿疹、かぶれ、傷口に直接貼らないでください。

**【ご使用方法】**

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                 | (2)                                                                                  | (3)                                                                                   | (4)                                                                                   | (5)                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| 粘着シートの真中の細い裏紙をはがしてください。                                                             | 薬面を上にしシップ剤の角を↑印に合わせ、真中の粘着部分を固定します。                                                   | シップ剤の片側をもちあげ、粘着シートの裏紙をはがしシップ剤を固定します。                                                  | もう一方も同じように裏紙をはずし、シップ剤をしっかりと固定します。                                                     | シップ剤の薬面のプラスチックフィルムをはがし、患部にお貼りください。                                                    |

- シップメイトは適当な大きさに切っても使えます。



患部に応じて  
適当な大きさに  
カットして使えます。



小さく切って  
普通の絆創膏のような  
使い方もできます。

〈包装〉14cm × 18cm …………… 6枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00－17:50（土日・祝日・会社休日を除く）