

新

第3類医薬品


カットバン®

NEW CUTBAN



色のつかない
殺菌剤配合

PLASTIC
BANDAGES

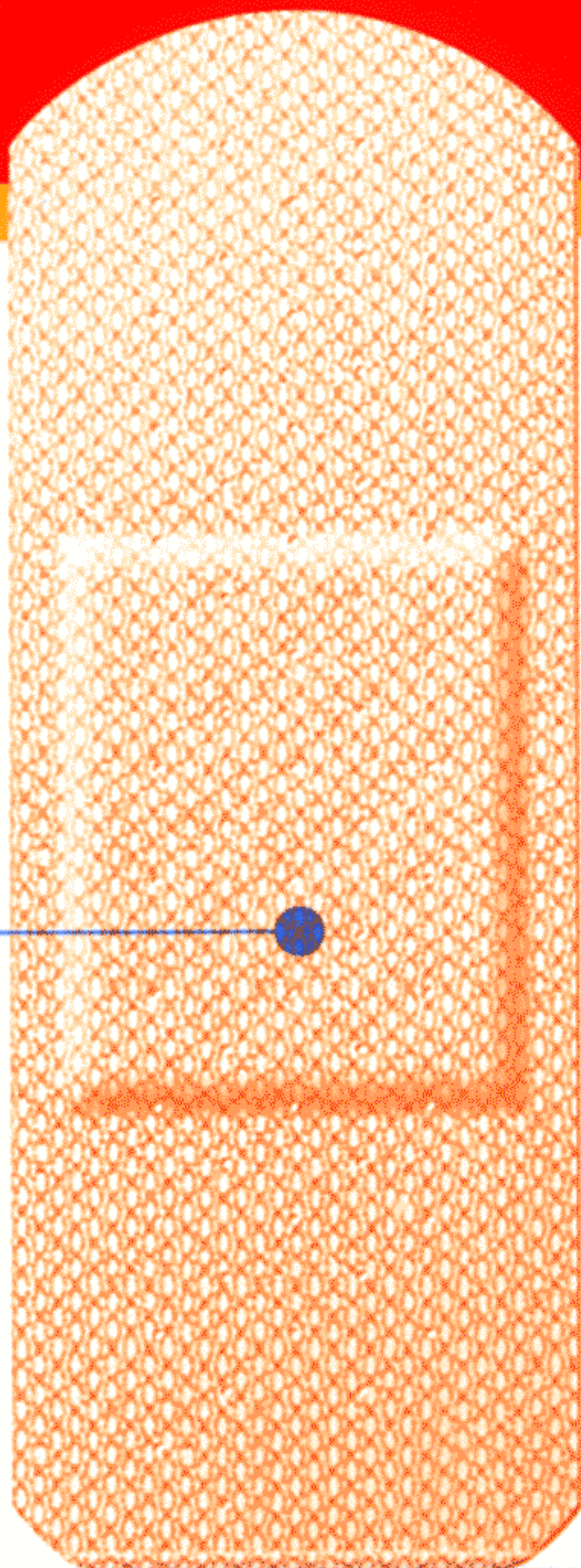

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能・効果】 切り傷、すり傷、かき傷、靴ずれの創傷面の殺菌消毒および保護

【用法・用量】 ライナーをはぎとりパッドを患部にはってください。

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2) 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。
(3) 粘着面を患部にはらないでください。
(4) パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、はり替えてください。

【成分・分量】 パッド1,000g中

ベンザルコニウム塩化物……………0.90g

パッド部分：ガーゼ、脱脂綿、添加物としてポリビニルアルコール(完全けん化物)を含有します。

テープ部分：添加物としてロジン、生ゴム、エステルガム、ポリブテン、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

製造販売元



祐徳薬品工業株式会社

日本製

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

【お客様相談窓口】TEL.0954-63-1320

受付時間9:00～17:00(土、日、祝日は除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

☎ 0120-149-931