

カンジダ溶菌酵素配合

入れ歯洗浄剤

ピカの使い方



ピカは
2種類

日 → 月 火 水 木 金 土 →

1週間に1回、赤色包装を使い、他の6日は青色包装を使います。

週に1回
赤色包装



赤色包装は活性酸素タイプの洗浄剤です。たばこのヤニや茶シブ、黄ばみなどのガンコな汚れをきれいに落とします。

残りの
6日間は
青色包装



青色包装は毎日の歯垢(プラーク)除去に使う酵素剤です。歯垢のもとになるカンジダ菌を溶解除去する酵素とタンパク性の汚れを分解する酵素のはたらきで、入れ歯を傷めず汚れやニオイを取り除き、いつも清潔に保ちます。



1 洗浄容器に水(ぬるま湯)を入れて、ピカを1錠(1袋)入れます。

冬は
ぬるま湯で



入れ歯を入れます。

きれいになるにつれて液の色が無色に変わります。

2



使い方は
かんたん!

3 約1時間できれいになっています。

一晩おくと
いっそうきれいに!



洗浄後は水でよくすすいでください。

4



※洗浄容器は、ガラスまたは陶磁器製のものをお使いください。

※入れ歯の材質によっては、まれに変色することがあります。その場合はただちに使用を中止してください。

ご使用にあたって

① 新しい入れ歯は青色包装から、すでに使用中の入れ歯は赤色包装からお使いください。

② 青色包装と赤色包装は同時に使わないでください。同時に使うと洗浄効果が悪くなります。

③ 60℃以上のお湯では使用しないでください。温度の影響で酵素の働きが悪くなるとともに、入れ歯が傷むことがあります。

④ アルミ包装は、使用する直前にあけてください。

※錠剤の斑点は酵素です。また糸状の結晶がまれに見られることがありますが、品質に変わりはありません。

新しい入れ歯は青ピカから!



60℃



使う直前に!




ご注意

① ピカやピカの溶液は口に入れないでください。誤って飲まれた場合には、医師にご相談ください。

② 万一、洗浄液が目に入ったら、水で洗い流してください。

③ 子供の手の届かない所、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

④ 入れ歯の洗浄以外には使わないでください。

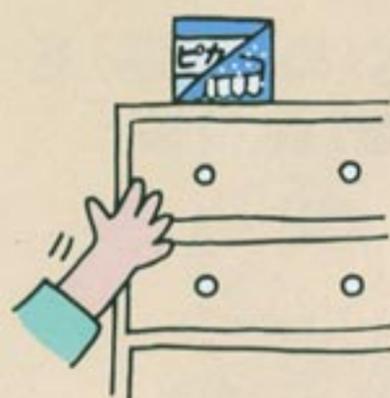

大切な入れ歯のために

① 入れ歯は汚れやすいものです。毎食後きれいに水洗いしましょう。(みがき粉は傷をつけるので、使用しないで!)

② 入れ歯は硬いものの上に落したり、熱湯や火に近づけるとたいへん! 気をつけましょう。

③ 入れ歯の調子が悪いときは、歯医者さんと相談しましょう。

④ 異常がなくても半年か1年に1回、歯医者さんにみてもらいましょう。



半年に1回

〇〇歯科



お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたにふえたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1