

ハイドロコロイド 素材採用

滅菌済・一般医療機器

小さいから
ストレスフリー

ひび

あかぎれ

ストツパンモイスト

Adhesive bandage

防水

ピンポイント

しっかり
密着*

※当社比



薄さ
0.05mm

傷口をしっかり守る

15×25mm
ハイドロコロイド素材



白十字



一般医療機器 医 04 整形用品
34864000 救急絆創膏

届出番号 :13B2X00023000194

再使用禁止

FCストップバンモイスト ピンポイント

【禁忌・禁止】●再使用禁止●感染がみられる傷には使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

ポリエチレンフィルムの支持体と粘着性をもったハイドロコロイドをラミネートしたものと、はくり紙からなる。

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合等を目的とする絆創膏です。

【使用上の注意】

●再度、滅菌しないでください。[品質及び安全性を保証できないため]●滅菌効果が損なわれますので、使用時に開封してください。●包装が破損及び汚染している場合には、滅菌効果が損なわれますので、使用しないでください。●傷口とそのまわりを清潔にし、水気をとってからご使用ください。水分があると貼りつきにくい場合があります。●次のような傷には使用しないでください。感染した傷、感染を起こす可能性のある傷、壊死組織がある傷、膿を持つ等の異常がある傷、にきびやとびひ等、目の周囲、粘膜、原因不明の傷、かさぶたがすでにできている傷●本品自体には治療効果はございません。傷の被覆及び保護等にご使用ください。●1日1～2回貼る場所を少しずらして貼り替えてください。[肌のかぶれ・損傷を防ぐため]●装着時は、伸ばして装着しないでください。[肌のかぶれ・損傷を防ぐため]●しっかりと肌になじませながら、装着してください。肌への粘着が不十分ですと、装着中に剥がれる恐れがあります。●使用中に、かゆみ・かぶれなどの症状や感染創と思われる症状が現れた場合には、使用を中止して、医師又は薬剤師にご相談ください。●ハンドクリームや軟膏と一緒に使用すると粘着性がおち、剥がれやすくなりますので、おやめください。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。●絆創膏より大きい傷には使用しないでください。●傷口の観察を十分に行い、使用後すぐに浸出液がもれ出す場合は本品を使用しないでください。●水仕事等により、周囲からの浸軟が発生することがございます。適宜貼り替えてください。●本品は小売りでの開封販売はできません。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため]

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け、清潔なところに保管してください。

2.有効期間

- 本品の使用期限は包装に記載

製造販売業者

 **白十字株式会社**

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

お客様相談室  0120-01-8910

受付時間/9:00～17:00(月～金※祝日を除く)

<https://www.hakujuji.co.jp>

※添付文書(A4判)の必要な方は
弊社までご連絡ください。

O P E N

MADE IN JAPAN

実物大

(15×25mm)

商品情報はこちら



【使用方法等】

1



表面のはくり紙①をはがし、粘着面を傷口に当てます。

2



残りのはくり紙②をはがし、テープのまわりに浮きやシワができないように、貼りつけてください。

3

本品を交換する際は、周囲の皮膚を軽くおさえながら、ゆっくり慎重にはがしてください。本品が創傷面や皮膚等に固着している場合は、生理食塩水等で固着した部分を湿らせ、はがしてください。