

滅菌済医療用具

注射用保護パッド

 穿刺部被覆保護材
 メディパッチ

再使用禁止

【販売名】

ブッシュテープ

【効能・効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷等の創傷面の保護、注射針等の穿刺部の被覆保護

【使用方法】

・創傷面とそのまわりを清潔にし、パッド部分をあててテープで固定して使用してください。

【使用上の注意】

- ・パッド部分が汚れたり水に濡れたときは新しいものに貼り替えてください。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

【保管上の注意】

- ・直射日光を避け、小児の手の届かないところに保管してください。

【用途】

- ・注射、採血、点滴関節穿刺後の被覆保護

【製造販売元】

発売元

 白十字株式会社

〒171-8552

東京都豊島区高田3-23-12

お客様相談室 ☎ 0120-01-8910

製造元

リバテープ製薬株式会社

〒861-0136

熊本県鹿本郡植木町岩野45

使用法

